

GEBRAUCHSANWEISUNG



Days Healthcare GmbH & Co. KG
Oberbecksener Str. 68
D-32547 Bad Oeynhausen
Telefon: + 49 (0) 5731.78 65 - 0
Telefax: + 49 (0) 5731.78 65 - 20
E-Mail: info@dayshealthcare.de
Internet: www.dayshealthcare.de

a **DCC** company

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für den CASA Clean I (M) entschieden haben. Er wird Ihnen sicherlich eine wertvolle Hilfe sein.



Dieses Symbol auf dem Typenschild des Toilettenstuhls deutet auf mögliche Gefahren im Umgang mit dem Hilfsmittel hin und dass die Gebrauchsanweisung unbedingt zu beachten ist. Achten Sie darauf, dass die Gebrauchsanweisung jedem Benutzer zugänglich ist !

1. Beschreibung:

Der Days Healthcare Toilettenstuhl CASA Clean I (M) ist aus pulverbeschichteten Stahlrohren gefertigt und ist standardmäßig mit einem hochklappbaren gepolsterten Toilettensitz, einem abnehmbaren Sitzpolster und gepolsterten Armauflagen ausgestattet. Der Toilettenstuhl wird mit einem Toiletteneimer inkl. Deckel und Schwenkbügel geliefert. Die Beine des Toilettenstuhls sind höhenverstellbar.

2. Gebrauch:

Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass der Toilettenstuhl stabil auf einem ebenen, waagerechten Boden steht. Der Eimer muss in die Vertiefungen der zwei Streben unter dem Toilettensitz eingesetzt werden.

Zur Höhenverstellung greifen Sie einen der halbkreisförmigen Clips zwischen Daumen und Zeigefinger und ziehen ihn heraus. Das Bein anschließend entsprechend der gewünschten Höhe einschieben oder herausziehen. Den Clip wieder fest in die Öffnung eindrücken. Diesen Vorgang bei den anderen Beinen wiederholen! ***Achtung!*** *Bei der Benutzung des Stuhls müssen alle 4 Beine auf die gleiche Höhe eingestellt sein!*

3. Technische Daten:

- ▶ Gesamtbreite: 55,7 bis 59,2 cm (in Abhängigkeit von der Einstellhöhe)
- ▶ Gesamthöhe: 84 bis 94 cm (in Abhängigkeit von der Einstellhöhe)
- ▶ Gesamttiefe: 56,3 bis 60,1 cm (in Abhängigkeit von der Einstellhöhe)
- ▶ Sitzhöhe ohne Sitzpolster: ca. 46 bis 56 cm (in Abhängigkeit von der Einstellhöhe)
- ▶ Gewicht: ca. 8 kg
- ▶ Max. Benutzergewicht: 100 kg

4. Prüfung / Wartung:

Der Toilettenstuhl ist so ausgelegt, dass er nur minimal gewartet werden muss. Untersuchen Sie den Toilettenstuhl in regelmäßigen Abständen auf Verformungen, lose Verbindungen oder andere sichtbare Beschädigungen. *Benutzen Sie niemals einen beschädigten Toilettenstuhl!*

5. Reinigung und Wiedereinsatz:

Zum Reinigen benutzen Sie ein weiches Baumwolltuch und ein mildes haushaltsübliches Reinigungsmittel. *Es dürfen keine Scheuermittel verwendet werden!*

Vor der Benutzung durch eine andere Person sollte eine Scheuer- / Wischdesinfektion durchgeführt werden. *Die Anwendungshinweise des eingesetzten Mittels sind dabei unbedingt zu beachten!*

Es sind nur Mittel und Methoden zur Desinfektion anzuwenden, die in den jeweiligen Listen (DGHM bzw. RKI) aufgeführt sind:

- Von der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) als wirksam befundene Desinfektionsverfahren.
- Vom Robert-Koch-Institut anerkannte Desinfektionsmittel und -verfahren.
- Für die Durchführung der Desinfektion sind die Regeln der BGR206 verbindlich.

6. Entsorgung:

Der Toilettenstuhl besteht hauptsächlich aus Metall- und Kunststoffbauteilen. Die Entsorgung der einzelnen Materialien ist entsprechend den regionalen Umwelt- und Entsorgungsbestimmungen vorzunehmen und kann nur nach dem Zerlegen des Toilettenstuhls erfolgen. Zum Zerlegen des Toilettenstuhls und zur Trennung und Entsorgung der Materialien sollten Sie ihn einem Fachhändler übergeben.

7. Gewährleistung:

Für den Toilettenstuhl übernimmt Days Healthcare im Rahmen seiner Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 24 Monate die Gewährleistung auf einwandfreie Beschaffenheit.