

Gebrauchsanweisung

Stehständer Nicco Stand

HMV 28.29.0X.XXXX

Stehständer Nicco Flex

HMV 28.29.02.XXXX

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde!

Wir möchten Ihnen für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und den Kauf unseres
Produktes danken.

Das Stehübungsgerät Nicco Stand/Nicco
Flex zeichnet sich durch seine Qualität,
Sicherheit, einfache Bedienung und
modernes Design aus.

Damit Sie dieses Hilfsmittel optimal nutzen
können, bitten wir Sie und evtl. andere
Benutzer die Gebrauchsanweisung sorg-
fältig durchzulesen.

Die Stehübungsgeräte Nicco Stand und
Nicco Flex wurden nach neuesten
Erkenntnissen entwickelt und sind mit
einem CE-Zeichen versehen.

Dieses Dokument ist ein wesentlicher
Bestandteil des erworbenen Artikels, der
wie folgt angegeben ist:

Nicco Stand – Nicco Flex.

Fertigungslos: siehe Plakette am Gerät.

Produkt Klasse 1


Klassifikation Direktive 93/42/EWG.

Bei Datenaustausch mit dem Hersteller
nehmen Sie bitte immer Bezug auf das
Produkt-Typenschild, das auf dem Rahmen
angebracht ist. Darauf befinden sich Serien-
und Modelleinheiten.

Ansprechpartner:
ATO-FORM GmbH
Zur Lauterhecke 34
63877 Sailauf
Telefon: 06093 944-0



**Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem
ersten Gebrauch sorgfältig durch!**

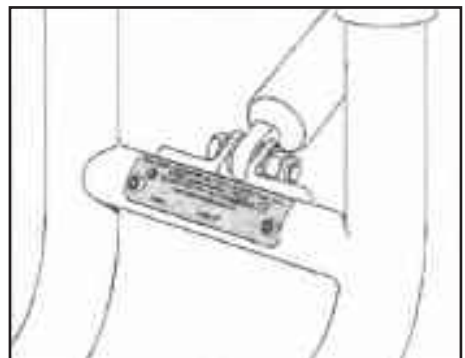

Thema	Seite	Thema	Seite
Allgemeine Warnhinweise	5/6	Wartung, Demontage und Reparatur . .	25
Gewährleistung und Produkthaftung	7	Aufbewahrung des Gerätes	25
Geräteübersicht	8	Technische Daten	26
Bei Empfang der Ware	9	Ersatzteile	26
Packungsinhalt	10		
Montageanleitung	11		
Gerätebeschreibung	12		
Standardausstattung	13/14		
Einstellung der geteilten Fußstütze . .	15/16		
Einstellung des durchgehenden Fußbrettes	17		
Anpassung der Kniepelotten	18		
Ein-, Ausbau und Anpassung der Rückeneinheit	19/20		
Einstellung der Hüftfixierteile	20		
Tiefen- und Breiteneinstellung – Wegklappen der Thoraxpelotten	21		
Höhenanpassung des rumpf- stabilisierenden Modulsystems	22		
Anpassung der flachen Teile für die Rumpfixierung	22		
Neigungsverstellung	22		
Therapietischeinstellung	23		
Kopfstützeinstellung	24		
Reinigung	25		

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise



Die Stehübungsgeräte Nicco Stand/Nicco Flex sind mit dem CE-Zeichen versehen. Sie wurden nach neuesten Erkenntnissen entwickelt. Die Herstellung unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle.

Die Stehhilfe Nicco Stand/Nicco Flex kann nur von Kindern bis maximal 40 kg (Nicco Flex) bzw. 70 kg (Nicco Stand) belastet werden.

Wichtige Hinweise!

Bei der Verwendung einer Stehhilfe befindet sich der Schwerpunkt immer relativ weit oben. Eine Person, die eine Stehhilfe benutzt, ist abhängig von der Stabilität des Gerätes, von den Abstützpunkten gegen den Körper und der Stützfläche zum Fußboden.

Das Stehübungsgerät wurde entwickelt, um möglichst vielen medizinischen Indikationen gerecht zu werden. Dennoch kann eine Stehhilfe nicht ausnahmslos für alle Situationen eingesetzt werden. Der Einsatz und die Nutzung sollten stets mit Vernunft und Bedacht erfolgen.

- Lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes die Hinweise der vorliegenden Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, da diese für Ihre Sicherheit und als Leitfaden für den korrekten Gebrauch und die korrekte Wartung des Produktes verfasst wurde. Die Gebrauchsanweisung ist unabdingbarer Bestandteil der Lieferung und sollte für spätere Zugriffe sorgfältig aufbewahrt werden.
- Die Gebrauchsanweisung richtet sich an die Wiederverkäufer und Benutzer des Gerätes, sie enthält Angaben über den korrekten Einsatz des Produktes, kann aber die nötige Erfahrung des Benutzers

Eine regelmäßige Kontrolle durch Ihren Fachhändler (mindestens 1x pro Jahr) verlängert die Lebensdauer der Stehhilfe und gibt Ihnen Sicherheit.

bzw. der Hilfsperson im Umgang mit dem Gerät nicht ersetzen.

- Ihr Wiederverkäufer hat die Pflicht, Ihnen das Gerät betriebsbereit zu übergeben, Ihnen die Funktionen und technischen Daten des Gerätes genauestens zu erklären, sowie Ihnen die nötige Hilfestellung und Einweisung für einen richtigen und effizienten Geräteeinsatz zukommen zu lassen.
- Die Angaben der Gebrauchsanweisung beziehen sich auf den Zeitpunkt, in welchem das Gerät in den Handel gebracht wurde. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle sich als notwendig erweisenden Änderungen am Gerät selbst und in der zugehörigen Gebrauchsanweisung vorzunehmen, ohne dazu verpflichtet zu sein, die jeweils vorhergehenden Geräte und entsprechenden Gebrauchsanweisungen ändern zu müssen.
- Die Stehhilfe Nicco Stand/Nicco Flex darf ohne die ständige Anwesenheit einer qualifizierten Person bzw. eines Familienmitglieds des Benutzers nicht zum Einsatz kommen.
- Die Stehhilfe Nicco Stand/Nicco Flex darf nur von Personen benutzt werden, die

- sich mit den Normen und Vorschriften der vorliegenden Gebrauchsanweisung vertraut gemacht haben.
- Die Stehhilfe Nicco Stand/Nicco Flex darf nur von Personen mit geeigneter Statur und körperlicher Eignung benutzt werden.
 - Der Nicco Stand/Nicco Flex ist nur für den Einsatz innerhalb von Gebäuden in trockenen Räumen vorgesehen.
 - Der Nicco Stand/Nicco Flex darf nicht vor offenen Feuerstellen stehen.
 - Auf die Ablagefläche des Nicco Stand/Nicco Flex dürfen keine zu heißen Behälter oder Objekte abgestellt werden, da hierdurch das Holz bzw. die Beschichtung ernsthaft beschädigt werden kann.
 - Führen Sie keinerlei Eingriffe oder Maßnahmen durch, wenn Sie sich nicht über deren Auswirkungen ganz sicher sind; im Zweifelsfalle wenden Sie sich an den nächsten technischen Service oder auch direkt an den Hersteller.
 - Überzeugen Sie sich stets davon, dass sich im Einsatzbereich des Nicco Stand/Nicco Flex keine Hindernisse wie z. B. Teppiche, Treppen oder auf dem Boden liegende Objekte befinden, die zum Umkippen des Gerätes führen könnten.
 - Räumen Sie alle Gegenstände auf Möbeln und andere Objekte auf die Seite, die während des Einsatzes des Gerätes evtl. angestossen werden und herabfallen könnten.
 - Der Einsatz des Gerätes und seiner Zusatzgeräte muss unter ärztlicher Kontrolle erfolgen.
 - Setzen Sie das Gerät niemals auf unwegsamem Gelände, stark geneigten Flächen oder Treppen ein.
 - Lassen Sie den Benutzer des Nicco Stand/Nicco Flex niemals mit dem Gerät allein.
 - Die Begleitperson muss darauf achten, dass keine Körperteile eingequetscht werden können.
 - Verwenden Sie die Stehhilfe Nicco Stand/Nicco Flex nicht, ohne sich zuvor von der korrekten Anbringung und der korrekten Einstellung der Fixierungsmöglichkeiten überzeugt zu haben.
 - Stellen Sie den Nicco Stand/Nicco Flex niemals auf stark abschüssigem Gelände fest.
 - Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Teile davon beschädigt sind oder gar fehlen.
 - Bei Unfällen oder Funktionsstörungen wenden Sie sich an Ihren Wiederverkäufer, von dem Sie das Gerät bezogen haben.
 - Kontrollieren Sie vor jedem Geräteeinsatz, dass alle regulierbaren Teile stets festgestellt sind.
 - Das Gerät darf vom Anwender nicht in Einzelteile zerlegt werden.
 - Reinigen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften im Kapitel „Reinigung und Wartung“.
 - Der Hersteller trägt in folgenden Fällen keinerlei Verantwortung für Schäden an Personen, Objekten oder Tieren:
 - falscher Einsatz des Hilfsmittels
 - Einsatz des Gerätes durch nicht geeignete Personen
 - falsche Anbringung von Teilen oder Zubehör
 - Verwendung nicht originaler Ersatzteile
 - Nichtbeachtung der in der vorliegenden Gebrauchsanweisung gegebenen Vorschriften
 - außergewöhnlichen Ereignissen.
 - Verlangen Sie stets nach Originalersatzteilen.
 - Prüfen Sie regelmäßig, ob Schrauben, Griffe etc. fest angezogen sind. Abge-

nutzte oder defekte Teile müssen sofort repariert oder ersetzt werden. Dies ist besonders für den gefahrlosen Einsatz des Hilfsmittels wichtig. Prüfen Sie sorgfältig Spannvorrichtungen und dergleichen auf festen Halt. Belasten Sie die Stehhilfe nicht mit schweren Gegenständen (z. B. auf dem Tisch), weil dadurch der Schwerpunkt und somit das Gleichgewicht beeinträchtigt wird.

- Seien Sie vorsichtig beim Fortbewegen der Stehhilfe, während ein Kind im Gerät steht. Dies gilt insbesondere beim Überqueren von Rampen, Schwellen und ähnlichem. Lassen Sie die Stehhilfe niemals von Personen bedienen, die sich nicht auskennen, bzw. die nicht diese Gebrauchsanweisung gelesen haben.

Wir entwickeln ständig neue Hilfsmittel und verbessern die bestehenden Produkte. Anregungen jeder Art nehmen wir gerne entgegen.

Gewährleistung und Produkthaftung

ATO FORM gibt auf die Stehhilfe Nicco Stand/Nicco Flex zwei Jahre Gewährleistung.

Es dürfen nur Original-Ersatz- und Zubehörteile verwendet werden.


Bei Nichtbeachtung bzw. Reparaturen oder Änderungen an der Stehhilfe Nicco Stand/Nicco Flex, oder deren Bestandteilen durch nicht autorisierte Personen erlischt jegliche Gewährleistung.

Jede Produkthaftung seitens des Herstellers (F.A.O. C. srl Ortopediche Colombo, Via Freguglia 1-20122 Milano) wird in diesen Fällen im voraus ausgeschlossen.

Geräteübersicht

1. Therapietisch
2. Knieelotten
3. Gesäß- und Rückenpelotte
4. Fußbrett/geteilte Fußstütze
5. Untergestell
6. anatomische Stütze für die Körperhaltung

Nicco Stand

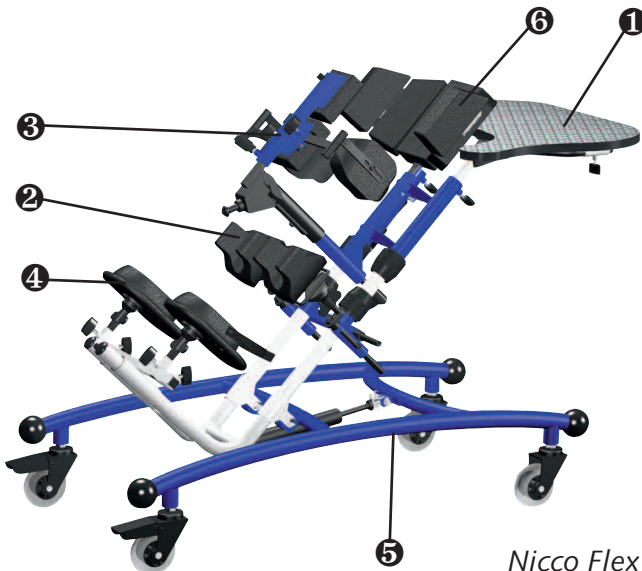


Nicco Flex


Bei Empfang der Ware


Wenn das Gerät geliefert wird, öffnen Sie den Karton vorsichtig, um Beschädigung zu vermeiden.

Schneiden Sie den Karton, wie im Bild dargestellt, an den gezeigten Stellen mit einem passenden Werkzeug auf, und folgen Sie den Anweisungen die eventuell auf dem Karton selbst angegeben sind.

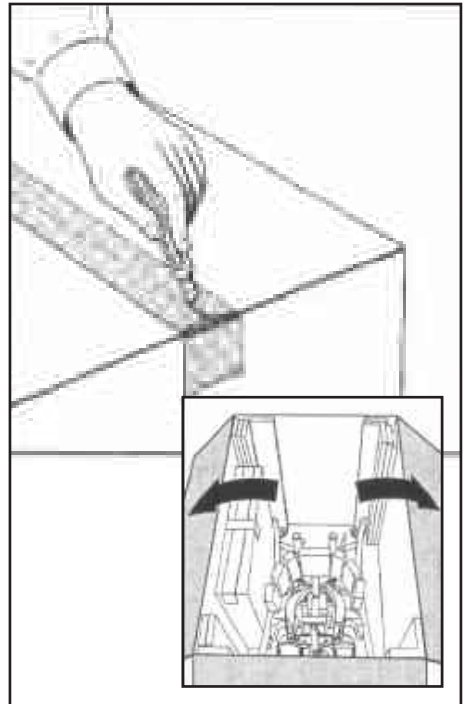


Nach Öffnen des Kartons, benutzen Sie einen Cutter an den zwei Ecken, wie es im Bild beschrieben wird. Schneiden Sie den Karton entlang der gesamten Kantenhöhe auf.

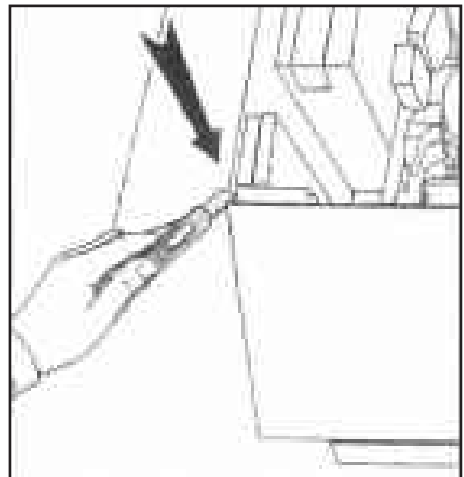


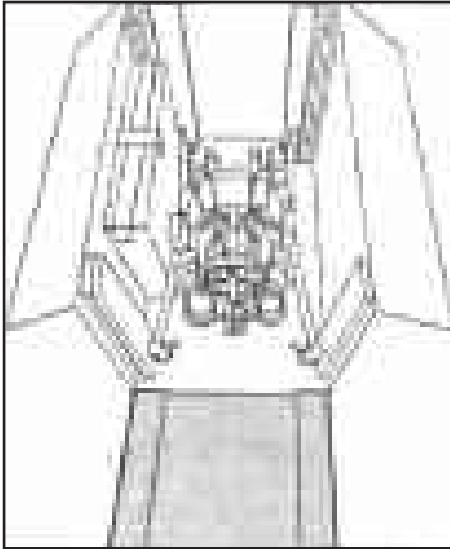


Nun ist eine Seite des Kartons völlig geöffnet und Sie können das Gerät entnehmen, indem Sie es auf den Rollen herausgleiten lassen.

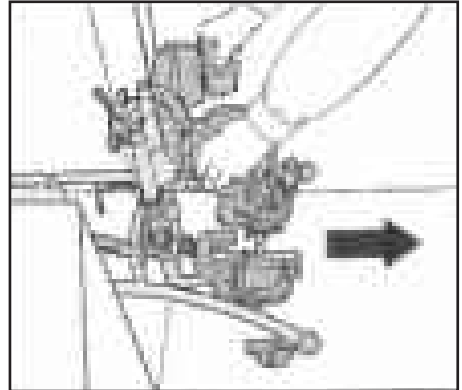

Inhalt der Packung:

1. Hauptprodukt
2. Therapietisch
3. Therapietischaufnahme
4. Inbusschlüssel
5. Kopfstütze
(Zubehör nur für Nicco Flex)

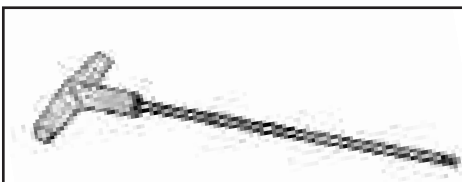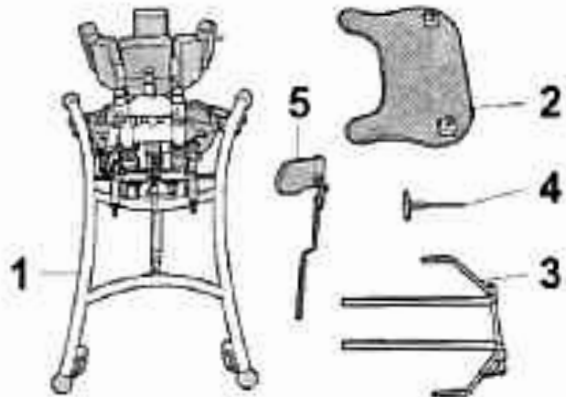



In einigen Fällen kann das Gerät schon zusammengebaut sein, dann finden Sie die Anleitung in einem Umschlag an dem Gerät, zusammen mit dem Inbusschlüssel, der sorgfältig aufbewahrt werden muss.

Falls das Gerät nicht zusammengebaut
verpackt wurde, folgen Sie der folgenden
Bauanleitung.

Den Therapietisch finden Sie in einer
zusätzlichen Verpackung. Bitte achten Sie
auch beim Auspacken des Therapietisches
darauf, dass dieser nicht beschädigt wird.

Montageanleitung:


Führen Sie die Therapietischhalterung in die
Aufnahmen (A-B), wobei Sie darauf achten
müssen, dass der Hebel (C) wie dargestellt
rechts ist.

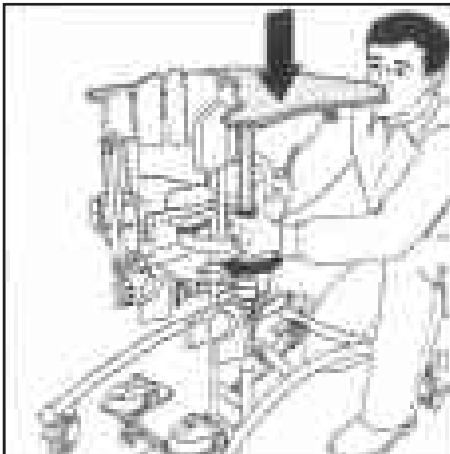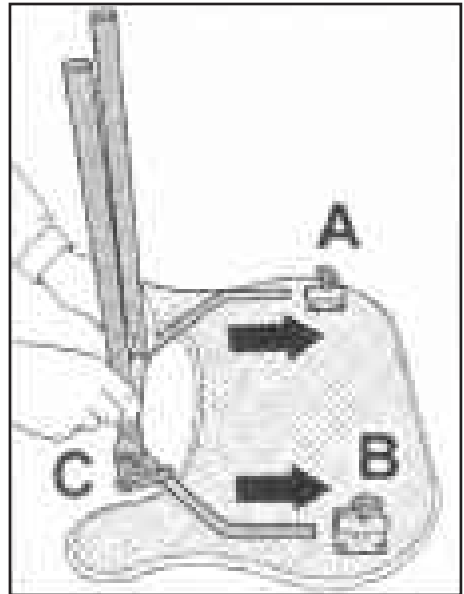

Führen Sie den Therapietisch in die
Tischaufnahmen ein, und befestigen diesen
mit den jeweiligen Klemmhebeln.

Nur für Nicco Stand

Bringen Sie die Kopfstütze (Zubehör) durch
Einführen der Schiene hinter der anatomi-
schen Rückenstütze an und ziehen Sie die
Knebelschrauben fest.

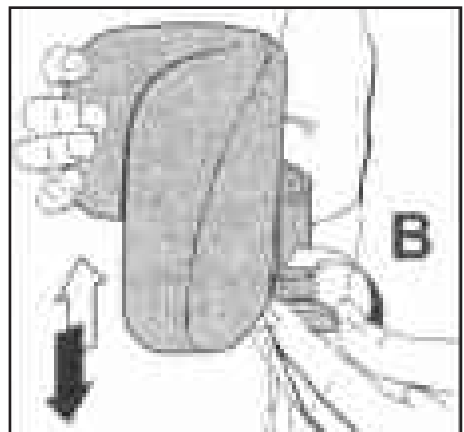

Gerätebeschreibung *Nicco Stand*

Nicco Stand ist ein Rehabilitationsgerät für die Therapie von Kindern, in einer vertikalen Position. Neigungswinkel bis 10 Grad.




Gerätebeschreibung *Nicco Flex*



Nicco Flex ist ein zuverlässiges Rehabilitationsgerät für die Therapie von Kindern in der vertikalen Position. Neigungswinkel bis 45 Grad.




Das Standardmodell setzt sich aus einer Basis mit vier Lenkrädern wovon zwei mit Bremsen ausgestattet sind zusammen. Es ist je nach Modell entweder mit einem durchgehenden oder zwei einzelnen Fußbrettern, einer Modulstütze, Kniestützen, einer Kreuzbeinstütze, einer Lendenstütze, einer Trochanter-Stütze (anatomische Körperhaltungsstütze), einem Therapietisch und je nach Gerätetyp mit einer verstellbaren Kopfstütze (Zubehör bei Nicco Stand) ausgestattet.

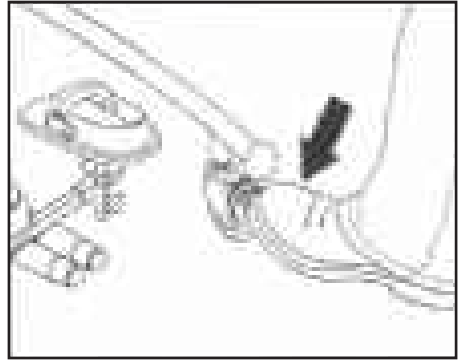


Das durchgehende Fußbrett kann in der Breite und Tiefe millimetergenau angepasst werden.

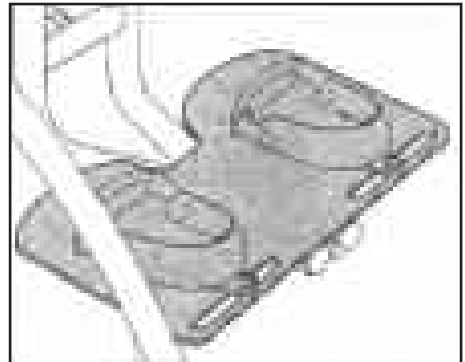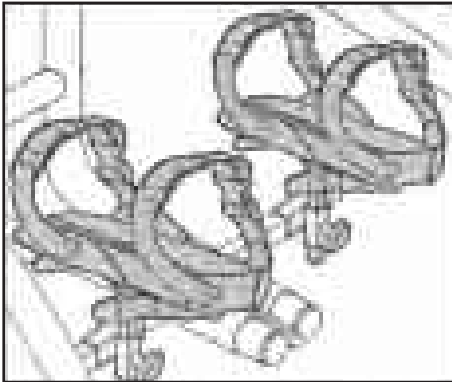


Die zweiteilige Fußstütze kann sowohl in der Breite als auch in der Adduktion und Abduktion angepasst werden.

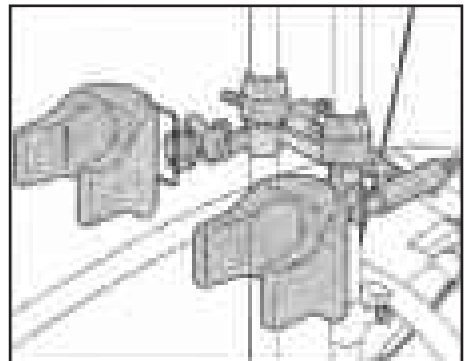


Das Kniestützensystem erlaubt die Anpassung in der Höhe, Tiefe und Breite. Die anatomische Kniestütze, hergestellt aus Polyurethan, ermöglicht die Anpassung an die Kniegelenkgröße und sorgt für Druckverteilung rund um die Kniescheibe.

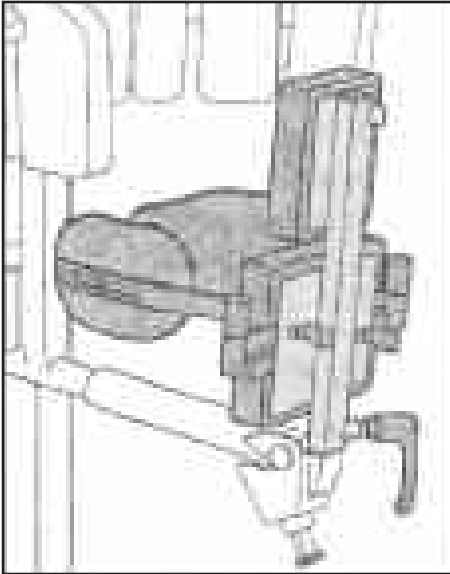

Gesäß-, Rücken- und Seitenpelotten für eine richtige Hüftstabilisation. Sie sind einstellbar in Höhe, Breite und Tiefe und von der Modul-Stütze entfernbar.

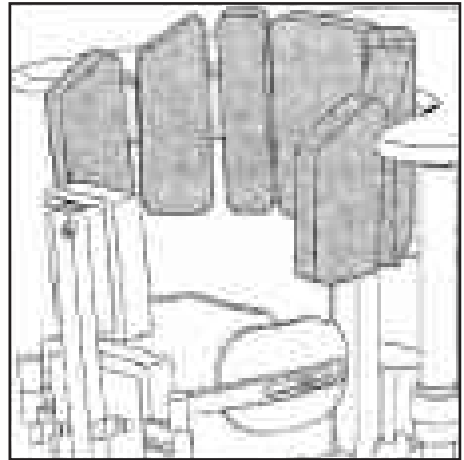

Die anatomische Thoraxpelotte ermöglicht durch ihre flexiblen Einstellmöglichkeiten die genaue Anpassung an das Wachstum des Kindes.

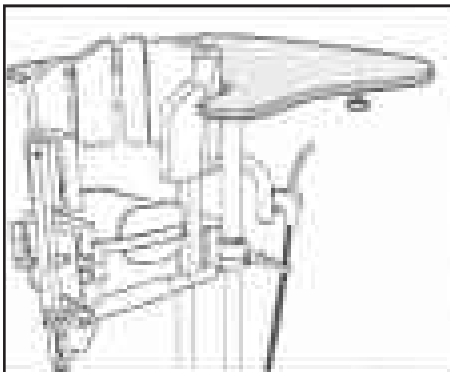


Der anatomisch geformte Therapietisch mit Unterarmstütze ist sowohl tiefen- als auch höhen- und neigungsverstellbar.

Auf Anfrage kann die Stehhilfe Nicco Flex mit einer in Tiefe, Höhe und Neigung verstellbaren Kopfstütze versehen werden.

Beim Nicco Stand ist die Kopfstütze ein Standardzubehör.




Nicco Stand und Nicco Flex sind Geräte, die für die richtige Haltung und Bewegung der stark behinderten Patienten während des Tagesablaufs entworfen wurden. Sie bieten eine ausreichende vertikale Haltung und Drehung.

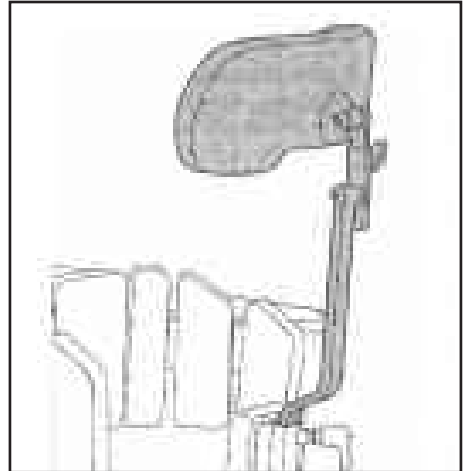


Einstellung geteilte Fußstütze

Stellen Sie die Tiefe des geteilten Fußbretts mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel an der Innensechskantschraube ein.

Verstellen Sie die Fußbretthöhe und -breite mit den Knebelschrauben ein (A für die Höhe und B für die Breite).

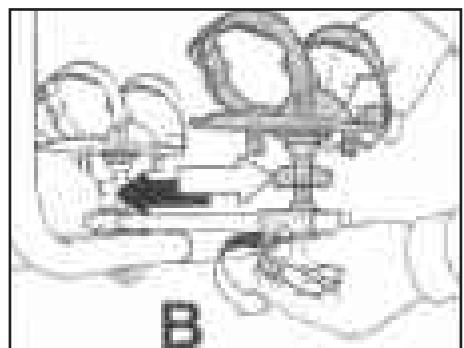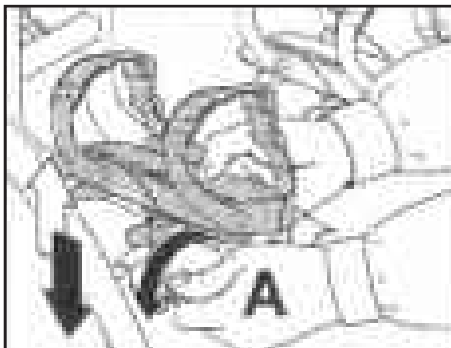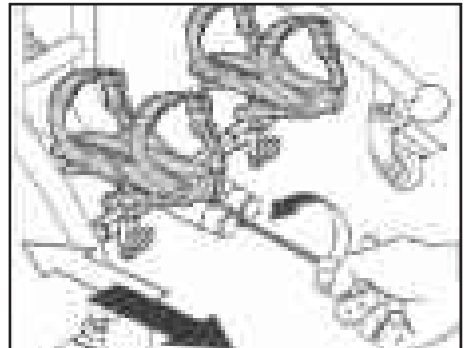

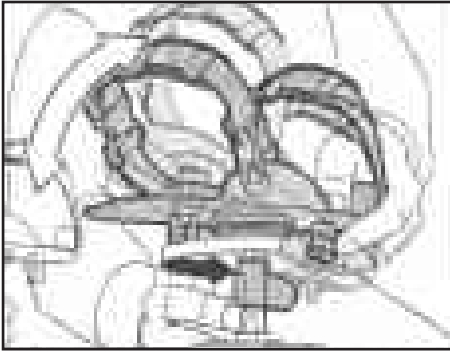


Stellen Sie die geteilte Fußstütze mit den Flügelschrauben ein. Es erlaubt eine Drehung in verschiedene Richtungen.



Diese Art Fußbrett ermöglicht die Einstellung der Fußbrettbreite millimetergenau, Dank eines einzigartigen Verstellsystems, wobei für jeden Fuß die Haltungsstütze individuell angepasst werden kann.

Zum Einstellen benutzen Sie die Stellschrauben, die sich unter dem Fußbrett befinden.

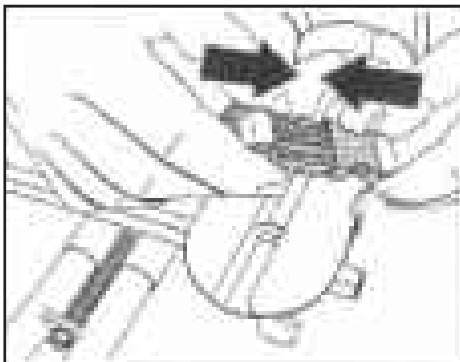


WICHTIG

Nach jeder Anpassung müssen die Schrauben wieder fest angezogen werden.

Um dem Fuß einen sicheren Halt zu geben, passen Sie die Gurtlänge mit den Klippverschlüssen an den Kinderfuß an.

Anpassung durchgehendes Fußbrett

Benutzen Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel, um die Tiefe des durchgehenden Fußbretts einzustellen.

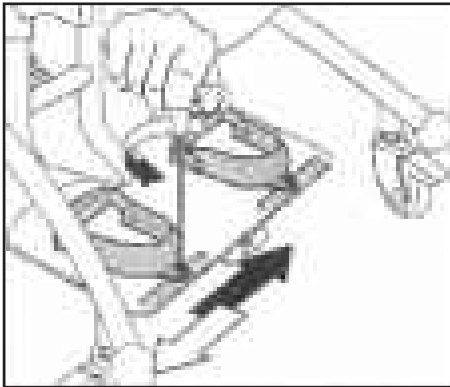

Um Fersenstützenwinkel und -breite einzustellen benutzen Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel für die Innensechskantschrauben, die die Fersenstützen arretieren.




Sichern Sie den Fuß mit den Klettbindern, die an den Fuß angepasst werden können.

Rückhaltesystemeinstellungen

Wichtig



Alle Anpassungen müssen von einem Physiotherapeuten oder ausgebildetem Personal (Die auf das Produkt geschult wurden) ausgeführt oder überwacht werden.

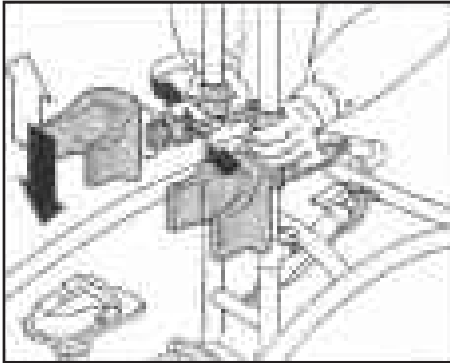

Anpassung Knieelotten


Die Knieelottenhöhe wird mit den zwei Drehreglern, wie auf dem Bild dargestellt angepasst.

Bitte beachten Sie die biomechanischen Parameter bei der Anpassung.

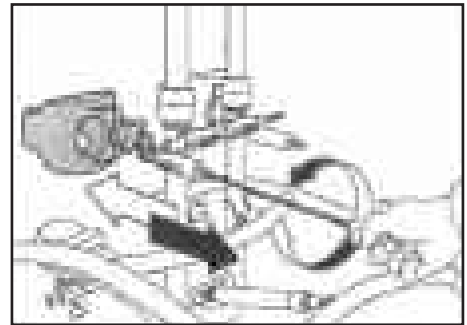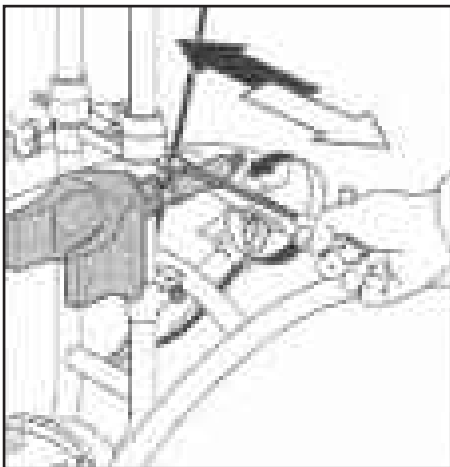

Die Kniestützentiefe wird mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel, wie im Bild oben, an den Einstellschrauben angepasst.

Die Breite wird mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel an den Einstellschrauben, wie im Bild links gezeigt, angepasst.

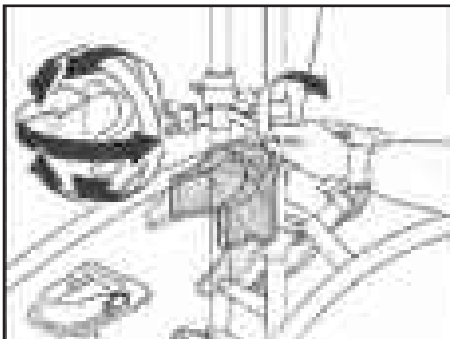

Der Drehregler ermöglicht die passgenaue Anpassung der zwei anatomischen Kniestützen (auch unabhängig voneinander und der Bewegung des Kindes), dank der ergonomischen Stütze und Anpassungsmöglichkeiten in viele Richtungen.

Einbau, Ausbau und Anpassung der Rückeneinheit.



! WICHTIG

Die folgenden Anwendungen müssen
von zwei Personen ausgeführt werden.


Lösen Sie den Schnellöffnungsmechanismus
(A), der Rückeneinheit.

Danach klappen sie die komplette Einheit
etwas nach vorne und nehmen sie nach
oben weg.

Wenn das Kind im Gerät steht, führen Sie
die Stütze wieder ein und bringen Sie sie in
eine aufrechte Position. Beachten Sie, dass
der Klemmhebel wieder festgestellt wird.

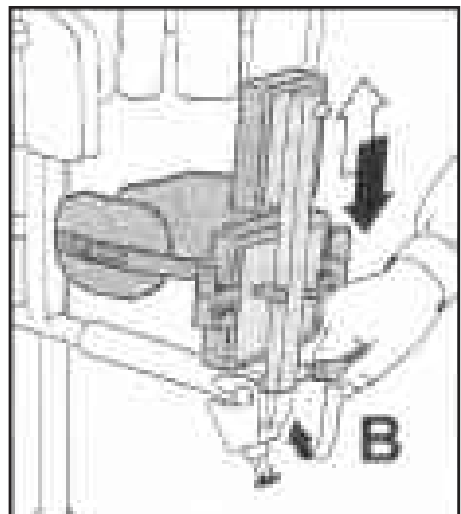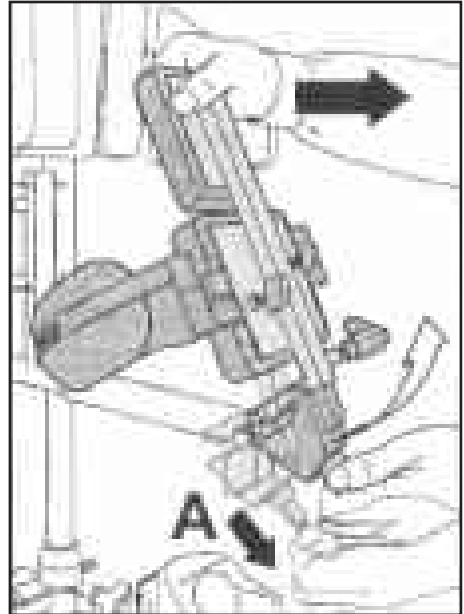


Verstellen Sie die Höhe der Pelotten, indem
Sie den entsprechenden Klemmhebel (B)
lösen.

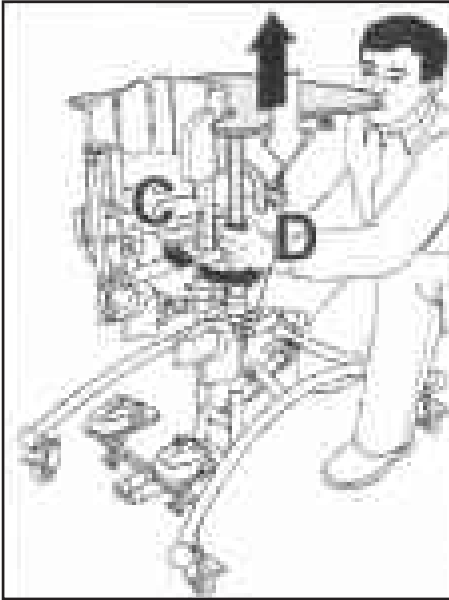

Um die Lenden-, Kreuz-, Steißbein- und Trochanterstütze in der Höhe einzustellen, lösen Sie die zwei Drehräder (C-D). Dann lösen Sie die Klemmhebel für die Tischhöhe.

Nach Einstellen der gewünschten Höhe unbedingt wieder beide Klemmhebel und Handräder festziehen.

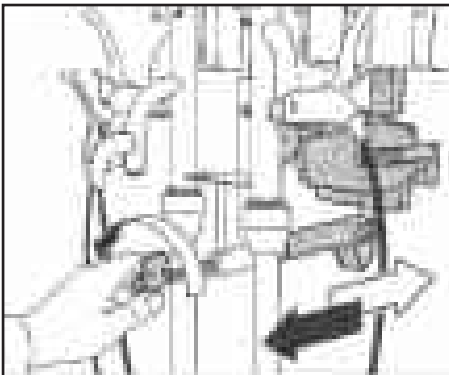

WICHTIG

Die folgenden Anweisungen müssen von 2 Personen ausgeführt werden.



Stellen Sie die Kreuz- und Steißbeinstützentiefe mit den Flügelschraube im vorderen Bereich ein.

WICHTIG


Um die Rückeneinheit auf das Kind anpassen zu können, ist es unerlässlich, zuerst die maximalen Verstellmöglichkeiten zu wählen. Das ermöglicht es, die vertikale Position millimetergenau zu erreichen.

Tiefen- und Breitenanpassung – Wegklappen der Thoraxpelotten


Stellen Sie die Thoraxpelotten mit den zwei Knebelschrauben ein, wie auf dem Bild gezeigt wird.

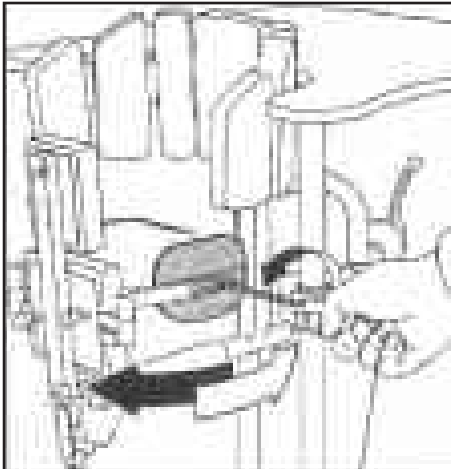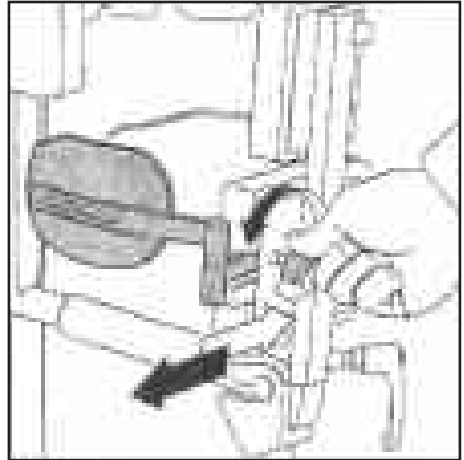

Für die Tiefe der Thoraxpelotten benutzen Sie den Inbusschlüssel an der Einstellschraube, wie im Bild dargestellt. Dadurch wird das richtige Fixieren der Hüfte ermöglicht, um eine mögliche Verdrehung zu vermeiden.

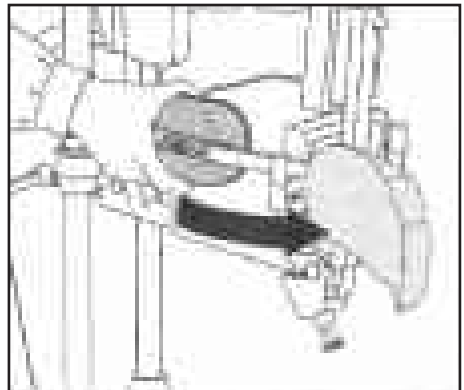

Das Wegklappen der Thoraxpelotten wird durch Anheben an dem Drehpunkt erreicht. Dieses System ermöglicht es, alle vorherigen Einstellungen beizubehalten.

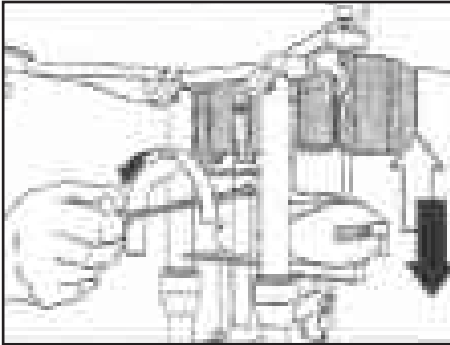


Höhenverstellung des Rumpf-Stabilisierungssystems

Benutzen Sie den Inbusschlüssel um die Verstellerschraube zu lösen, die das Versetzen der rechteckigen Stütze ermöglicht.


WICHTIG

Das Modulsystem für die Oberkörperstütze darf nie höher als das Brustbein sein.

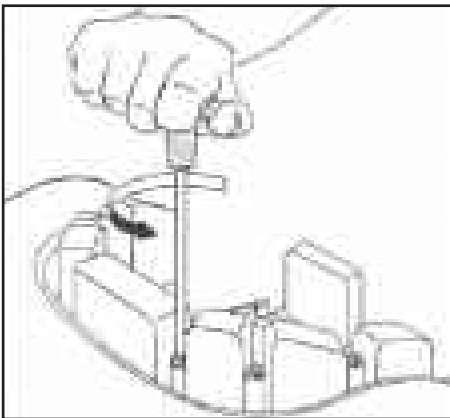

Anpassung der flachen Teile der Oberkörperstütze


Nach dem Zusammenbau können diese Teile mit Hilfe des Inbusschlüssels und den Innensechskantschrauben, die diese Teile verbinden, unterschiedlich zueinander angeordnet werden.

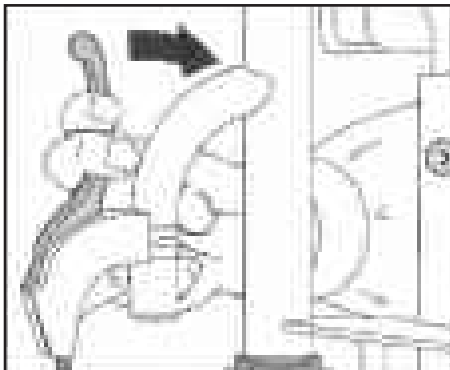

Neigungsverstellung


Wenn die Stehhilfe zusammengebaut ist, kann man die Neigung bei der Benutzung des entsprechenden Hebels verstellen.


Stellen sie die Stehhilfe in die gewünschte Schräglage wobei sie darauf achten müssen, einen Fuß als Gegengewicht zum Gewicht des Kindes unten auf den Rahmen zu stellen (siehe Abbildung).

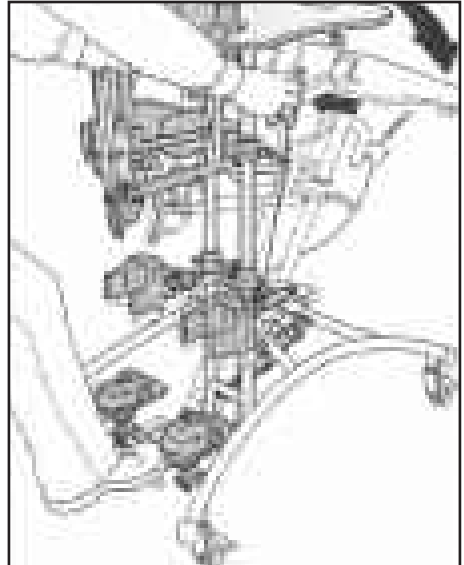

Therapeutisch-Einstellung

Die Tisch-Höhe kann durch Lösen der Knebelschrauben (A, B) eingestellt werden. Die Tisch-Tiefe kann durch Lösen der Knebelschrauben (C, D) eingestellt werden. Der Winkel des Tisches wird durch den Klemmhebel an der Seite eingestellt.


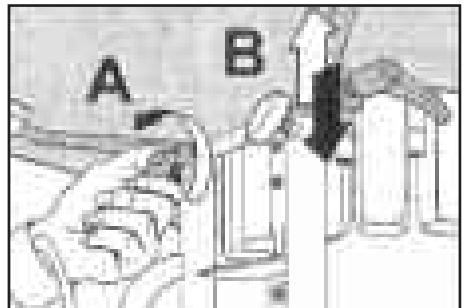


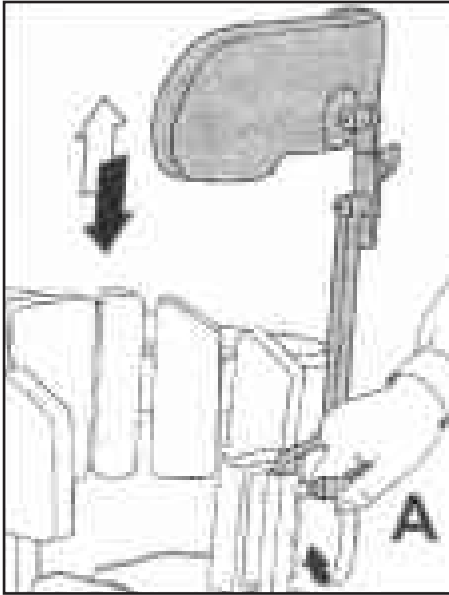

Kopfstützen-Einstellung (Option für Nicco Stand)

Stellen Sie die Höhe der Kopfstützenhalterung ein, indem Sie den Klemmhebel (A) lösen.

Stellen Sie die Höhe der Kopfstütze ein, indem Sie das den Klemmhebel (B) lösen.

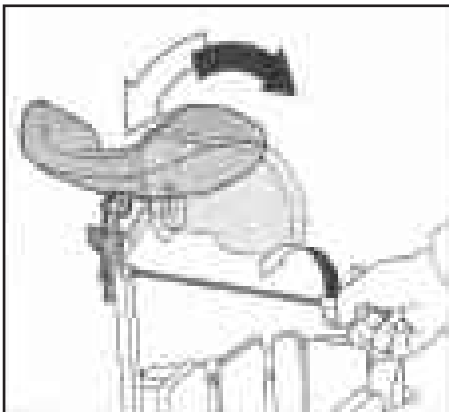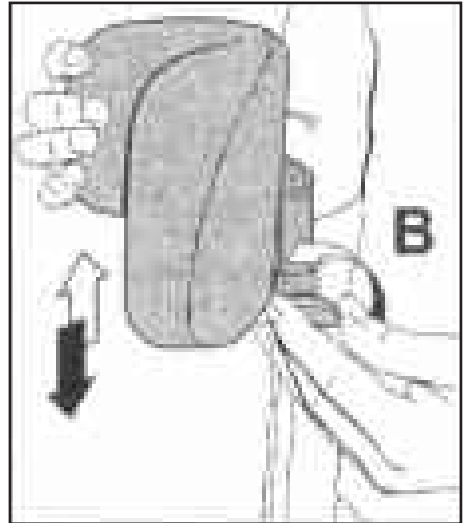

Sie können die Tiefeneneigung der Kopfstütze einstellen, indem Sie die Innenkantenschraube mit dem Inbusschlüssel lösen.

Reinigung

Nicco Stand und Nicco Flex werden ohne Textilien hergestellt und sind dadurch pflegeleicht.

Die Metallteile und die Polyurethan-Teile (anatomische Stützen) oder die Nylonteile (Bänder) können mit einem feuchten Schwamm oder einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Für die lackierten oder verchromten Teile des Rahmens (einschließlich der Gummiteile) können Sie einen Schwamm oder warmes Wasser verwenden.

Benutzen sie keine Löse- oder Scheuermittel die die Oberfläche beschädigen können.

Trocknen Sie nach der Reinigung des Gerätes mit einem trockenen Tuch nach.

Reinigung der Räder

Reinigen Sie die Räder mindestens einmal monatlich von Verschmutzungen (Haare, Fäden usw.), die sich um die rotierenden Teile wickeln können. Schmieren Sie die gleitenden Teile mit Sprühfett o. ä. ein.

Reinigung des Therapietisches

Die obere und untere Oberfläche bitte nur mit einem feuchten Tuch oder einem weichen Schwamm (kein Scheuerschwamm) reinigen.

Die Teile können auch mit einem geeigneten Mittel für nicht-imprägnierte Holz- oder laminierte Oberflächen, die im öffentlichen Handel erhältlich sind, gereinigt werden.

Wartung, Demontage und Reparatur

Um das Gerät (z.B. zum leichteren Transport) auseinanderzunehmen, empfiehlt es sich das Gerät in mindestens zwei Hauptteile zu zerlegen.

- Körperstützteile und Rahmen
- Therapie-Tisch

Diese Aktion muss durch Lösen der zwei Ringe die am Rahmen befestigt sind und dem Entfernen des Tablett vom Rahmen erfolgen.

Der Nicco Stand/Nicco Flex ist ein Medizinprodukt und ist gemäß den gültigen Verordnungen, spätestens jedoch alle 12 Monate einer sicherheitstechnischen Kontrolle durch eine Fachkraft zu unterziehen.

Bei Fragen zu Ersatzteilen oder Reparaturen wenden Sie sich an einen autorisierten Händler, der die benötigten Teile anbietet oder die notwendigen Reparaturen ausführt.

Wartung sowie Ersatz von Geräteteilen oder Zubehör dürfen nicht erfolgen, wenn das Gerät durch den Patienten im Gebrauch ist.

Technische Daten:

Nicco Stand/Nicco Flex	Größe 1	Größe 2	Größe 3
Körpergröße:	72-110 cm	105-135 cm	130-150 cm
Höhe der Kniepelotten:	15-30 cm	23-45 cm	33-53 cm
Höhe der Hüftpelotten:	32-47 cm	50-65 cm	73-83 cm
Höhe der Brustpelotte:	46-68 cm	67-90 cm	95-105 cm
Therapietisch-Höhe:	48-76 cm	74-100 cm	98-130 cm
Beckentiefe:	15-20 cm	18-28 cm	18-28 cm
Breite der Hüftpelotten:	11-25 cm	16-30 cm	16-30 cm
Grundrahmen-Länge:	74 cm/90 cm	80 cm/100 cm	88 cm/130 cm
Grundrahmen-Breite:	58 cm	62 cm	71 cm
Therapietisch-Maße (Länge x Breite):	40 x 50 cm	50 x 59 cm	62 x 66 cm

Ersatzteile

Es dürfen nur Original-Ersatzteile und Zubehör verwendet werden. Bei Nichtbeachtung bzw. Reparaturen oder Änderungen an der Stehhilfe Nicco Stand/Nicco Flex oder dessen Bestandteilen durch nicht autorisierte Personen, erlischt jegliche Gewährleistung.

Jede Produkthaftung seitens des Herstellers (F.A.O. C. srl Ortopediche Colombo, Via Freguglia I-20122 Milano) wird in diesen Fällen im voraus ausgeschlossen.

Für Fragen zu Ersatzteilen und Zubehör wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an den ATO FORM-Service unter der Tel.-Nr.: 06093/944-0.

Aufbewahrung des Geräts

Nicco Stand/Nicco Flex-Geräte brauchen keinen besonderen Lagerplatz.

Die lackierten und verchromten Teile sind garantiert unempfindlich gegen korrosive Einflüsse und bleiben in ihrer Struktur erhalten.

Wenn das Gerät über längere Zeit nicht benutzt werden sollte, sollte es an einem trockenen Ort gelagert werden und mit einem trockenen Tuch abgedeckt werden, um es vor Staub und Feuchtigkeitseinflüssen zu schützen.

In Sachen Umweltschutz:

Alle Verpackungsteile sind wieder verwendbar. Die Kartontage soll dem Wertstoff Altpapier zugeordnet werden.

Wir verwenden deshalb als Füllstoff auch Papier. Eventuell verwendete Kunststofffolien der Verpackung sind aus PE, können somit schadstoffarm verbrannt oder recycelt werden.

Gesamtprogramm:

- Gehhilfen
- Gehtrainer
- Stehhilfen
- Sitzhilfen
- Hilfsfahrzeuge
- Lifter
- Körperschutz
- Sonderbau

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unseren Produkten.
Bei Fragen stehen wir Ihnen, wie auch unsere
Außendienstmitarbeiter oder Ihr Fachhändler, gerne
zur Verfügung.

Ihr ATO FORM Team

Ihr Fachhändler: