

Gebrauchsanweisung

Bettaufrichter
SAALE

 Thema	Seite
Vorwort	3
Reinigung	4
Wartung	4
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Warnhinweise	5
Gewährleistung und Produkthaftung	6
Verwendungszweck	6
Technische Daten	6
Montage	7

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde!

Wir möchten Ihnen für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und den Kauf
unseres Produktes danken.

Der Bettaufrichter SAALE zeichnet
sich durch seine Qualität, Sicherheit,
einfache Bedienung und modernes
Design aus.

Damit Sie dieses Hilfsmittel optimal
nutzen können, bitten wir Sie und
eventuell andere Benutzer, die
Gebrauchsanweisung sorgfältig
durchzulesen.



**Bitte lesen Sie die Anleitung
vor dem ersten Gebrauch
sorgfältig durch!**

Reinigung

Der Bettaufrichter SAALE ist mit den üblichen Haushaltsreinigern ohne schleifende oder ätzende Eigenschaften abwaschbar. Es empfiehlt sich ein Abwischen mit einem feuchten Tuch und nachfolgend mit einem trockenen Tuch. Keine Lösungsmittel oder Chlor verwenden.

Bei Reinigungsmitteln beachten Sie bitte die Gebrauchsvorschriften des Herstellers.

Warnung!

Keine starken Reinigungsmittel verwenden, die ggf. die Oberfläche des Gerätes angreifen.

Wartung

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiß.

Es wird daher empfohlen, das Produkt **alle 6 Monate** von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.

Sicherheitshinweise

Der Bettaufrichter SAALE ist mit dem CE-Zeichen versehen und entspricht den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG. Es wurde nach neuesten Erkenntnissen entwickelt. Die Herstellung unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle.



Wichtige Warnhinweise

- Die Aufrichthilfe ausschliesslich wie im Abschnitt „Verwendungszweck“ beschrieben verwenden.
- Die Aufrichthilfe ist nur anwendbar bei Bettengrößen für Personen über 12 Jahre.
- Bettenrollen während der Benutzung der Aufrichthilfe stets feststellen.
- Vor Gebrauch die korrekte Montage der Rohre laut Anweisung kontrollieren.
- Vor Gebrauch sicherstellen, dass das Band zwischen den beiden Haltern korrekt sitzt.
- Die Aufrichthilfe nur am Kopfende des Bettes und nur auf einer ebenen Unterlage plazieren.
- Aufbau und Montage sowie Benutzung nur unter Aufsicht von Fachpersonal gestattet.
- Produkt nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden.
- Vor jedem Gebrauch ist eine Sichtprüfung auf äußere Schäden durchzuführen.
- Verformte Aufrichthilfe nicht richten oder wieder einsetzen.
- Die Firma ATO FORM GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Risiken, die durch unsachgemäßen Gebrauch im Zusammenhang mit diesem Produkt verursacht werden.

Eine regelmäßige Kontrolle durch einen Fachmann (mindestens zweimal pro Jahr) verlängert die Lebensdauer des Bettaufrichters SAALE und gibt Ihnen Sicherheit.

Gewährleistung und Produkthaftung

ATO FORM gibt auf den Bettaufrichter
SAALE 24 Monate Gewährleistung.

Es dürfen nur Original-Ersatz- und Zubehör-
teile verwendet werden. Bei Nichtbeach-
tung bzw. Reparaturen oder Änderungen
am Bettaufrichter SAALE oder dessen Be-
standteilen durch nicht autorisierte Per-
sonen erlischt jegliche Gewährleistung.

Jede Produkthaftung seitens des Herstellers
(ATO FORM GmbH, Zur Lauterhecke 34,
63877 Sailauf) wird in diesen Fällen im
voraus ausgeschlossen.

Verwendungszweck

Der Bettaufrichter SAALE dient als Aufricht-
hilfe im Bett von der liegenden in die
sitzende Position.

Technische Daten

Der Bettaufrichter SAALE ist in 3 Teile zerleg-
bar. Stabiles Stahlgestell und Standfuß, pul-
verbeschichtet. Gesamthöhe ca. 170 cm,
bis Maximalgewicht von 90 kg belastbar.


**Technische Änderungen
vorbehalten!**

Montage

- Platzierung des Stützfußes (1).
- Verbindungsstange (2) in Aufnahme (4) stecken.
- Tragestange (3) in Aufnahme (5) stecken.
- Triangelgriff (6) an vorderen Teil der Tragestange befestigen (min. 5 cm bis zum vorderen Stangenende frei lassen).

Das Band mit Triangelgriff zwischen den beiden Stiften am Ständeroberteil anbringen.

Die Gestellbeine werden unter dem Bett positioniert. Den Bettaufrichter nur am Kopfende des Bettes platzieren, so dass er NICHT seitlich belastet wird.

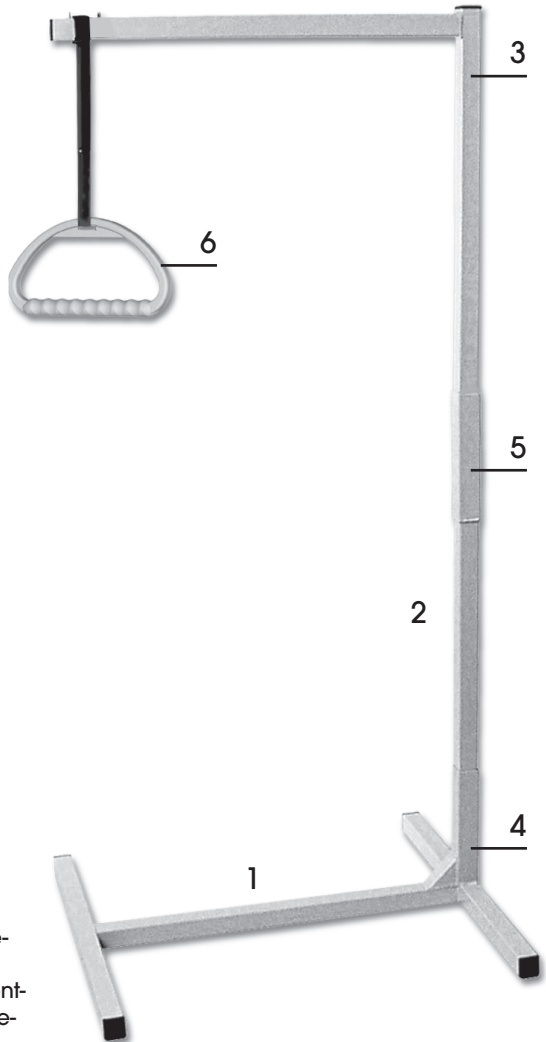

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinien für Medizinprodukte entsprechend dem Medizinproduktegesetz (MPG).

Gesamtprogramm:

- Gehhilfen
- Gehtrainer
- Stehhilfen
- Sitzhilfen
- Hilfsfahrzeuge
- Lifter
- Körperschutz
- Sonderbau

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unseren Produkten.
Bei Fragen stehen wir Ihnen, wie auch unsere
Außendienstmitarbeiter oder Ihr Fachhändler, gerne
zur Verfügung.

Ihr ATO FORM Team

Ihr Fachhändler: