

better **days** by  
**atoform**<sup>®</sup>

**BEDIENUNGSANLEITUNG**



**Casa Med II**

**Casa Comfort II**

**Casa Vario T**

mit DEWERT<sup>®</sup> Antriebssystem



Alle **Days Healthcare** Pflegebetten werden nach den neuesten technischen Möglichkeiten und im Hinblick auf höchsten Liege- und Bedienkomfort hergestellt. Weiterhin wird bei der Konstruktion großer Wert auf einfachste Handhabung und Bedienung gelegt. Die Verwendung ansprechender Holzdekore schafft eine wohnliche Atmosphäre. Eine Vielzahl von sinnvollem Zubehör rundet das Lieferprogramm um die Pflegebetten ab.

Die in der Anleitung beschriebenen Pflegebetten sind nach den folgenden Normen gefertigt:

DIN EN 60601-2-38 (Norm für Krankenhausbetten)

DIN EN 1970 - 2000 - 12 Nr5.12.1 (Norm für Pflegebetten).

Da das Motorensystem des Pflegebettes keine Steuerung mit einer Taktfrequenz > 9 kHz besitzt und hauptsächlich motorsch kurzzeitig betrieben wird, findet hier gemäß EN 60601-1-2 36.201.1.4 die EN 55014-1 Anwendung.

Die nachfolgende Bedienungsanleitung macht Sie mit den Funktionen des Pflegebettes vertraut und liefert unter anderem Beschreibungen zur

- Aufstellung des Pflegebettes
- Bedienung der Verstellelemente
- Pflege und Wartung des Pflegebettes

Die Bedienung und der Aufbau ist anhand von Fotografien der Pflegebettausführung **Casa Med II** erläutert. Schriftliche Erläuterungen weisen Sie auf Abweichungen bei der Bedienung und dem Aufbau in Bezug zu anderen Bettausführungen hin.

Die Anleitung ist nach den zum Zeitpunkt der Drucklegung bekannten Informationen hinsichtlich der Ausführung und Bedienung des Pflegebettes erstellt worden. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Bei Fragen zum Pflegebett wenden Sie sich bitte an Ihr Sanitätshaus.

<b>1.0</b>	<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>7</b>
1.1	Verwendete Symbole .....	7
1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung .....	7
1.3	Allgemeine Hinweise .....	8
1.5	Hinweise für Pflegepersonal, Betreuer und Bediener .....	9
1.4	Hinweise zur elektrischen Ausrüstung.....	9
1.6	Hinweise zum Aufstellen der Pflegebetten .....	10
1.7	Hinweise zur Wartung und Inspektion.....	11
<b>2.0</b>	<b>Ausführungen der Pflegebetten</b> .....	<b>12</b>
<b>3.0</b>	<b>Lieferumfang</b> .....	<b>12</b>
<b>4.0</b>	<b>Bauteile</b> .....	<b>15</b>
<b>5.0</b>	<b>Ausstattung: Bettgestell</b> .....	<b>15</b>
5.1	Seitengitter .....	15
5.2	Liegefläche .....	16
5.3	Winkelverstellung des Fußteiles (Rastomat) .....	16
5.4	Scherenheber .....	16
<b>6.0</b>	<b>Ausstattung: Elektrik</b> .....	<b>17</b>
6.1	Handschalter .....	17
6.1.1	Verriegelung des Handschalters.....	17
6.2	Liegeflächenmotor .....	18
6.3	Steuereinheit .....	18
<b>7.0</b>	<b>Aufstellen des Pflegebettes</b> .....	<b>19</b>
7.1	Platzwahl und Platzbedarf .....	19
7.2	Scherenheber vorbereiten .....	20
7.3	Kopf- und Fußteil der Liegefläche verbinden .....	20
7.4	Elektroelemente montieren .....	21
7.4.1	Liegeflächenmotor der Kopfteilverstellung einsetzen .....	21
7.4.2	Liegeflächenmotor der Fußteilverstellung einsetzen.....	22
7.4.3	Liegeflächenmotor, Handschalter anschließen .....	23
7.4.4	Netzkabel der Steuereinheit befestigen.....	24
7.4.5	Kabel des Handschalters befestigen.....	25
7.4.6	Liegefläche und Scherenheber verbinden.....	26
7.5	Fronten an der Liegefläche montieren.....	29
7.6	Kabelverlegung - Kabelplan.....	30
7.7	Funktionstest durchführen .....	31
7.8	Seitengitter einsetzen .....	31
7.9	Aufrichter montieren.....	33
<b>8.0</b>	<b>Sicherheitseinrichtung</b> .....	<b>33</b>
8.1	Steuereinheit .....	33
8.2	Notentriegelung der Kopfteilverstellung .....	34

<b>9.0</b>	<b>Bedienung des Pflegebettes.....</b>	<b>35</b>
9.1	Allgemeine Hinweise zur Bedienung - 3-fach geteilte Liegefläche	35
9.2	Allgemeine Hinweise zur Bedienung - 4-fach geteilte Liegefläche	36
9.3	Netzkabel einstecken .....	36
9.4	Seitengitter anheben /absenken .....	37
9.5	Verriegeln der Bedientastender Pflegebettverstellung .....	38
9.5.1	Bedientasten magnetisch sperren / freigeben.....	39
9.5.2	Bedientasten mechanisch sperren /freigeben.....	40
9.5.3	Bedientasten mechanisch sperren /freigeben (programmierbarer Handschalter) .....	41
9.5.4	Programmieren der Bedientasten .....	42
9.6	Bedienung der Pflegebettverstellungen .....	43
9.7	Bedienung der Bremsen.....	44
9.8	Fußteil der Liegeflächeverstellen (Rastomat) .....	45
9.9	Schieben des Pflegebettes und Patiententransport .....	46
9.10	Federhärte der Liegefläche einstellen.....	47
<b>10.0</b>	<b>Patientenbezogene Sicherheitsmaßnahmen und Einstellungen durch das Pflegepersonal .....</b>	<b>48</b>
10.1	Einschränkungen der Verwendung .....	48
10.2	Spaltmaße und Gitterabstände.....	48
10.3	Verriegeln der Pflegebettverstellungen .....	49
<b>11.0</b>	<b>Reinigung und Desinfektion während der Verwendung .....</b>	<b>49</b>
11.1	Reinigen .....	49
11.2	Desinfektion .....	49
<b>12.0</b>	<b>Wiedereinsatz .....</b>	<b>49</b>
<b>13.0</b>	<b>Prüfplan für Pflegebetten .....</b>	<b>50</b>
13.1	Tägliche Kontrolle .....	51
13.2	Halbjährliche Kontrolle - Steuereinheit prüfen .....	51
13.3	Prüfintervalle .....	51
13.4	Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) der mechanischen Bauteile	52
13.5	Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) der elektrischen Bauteile	54
13.6	Sicherheitstechnische Kontrolle - Messung nach BGV A3 .....	55
<b>14.0</b>	<b>Fehlersuche .....</b>	<b>56</b>
<b>15.0</b>	<b>Entsorgung .....</b>	<b>57</b>
<b>16.0</b>	<b>Anhang .....</b>	<b>58</b>
16.1	Technische Daten: Pflegebett.....	58
16.2	Technische Daten: Antriebssystem .....	59
16.3	Kennzeichnung der Pflegebetten.....	59
16.3.1	Typenschild des Pflegebettes .....	59
16.3.2	Bauteilschild des Aufrichters .....	59

16.4 Einsetzen des Vario T Pflegebettes in vorhandene Bettumrandungen .....	60
16.4.1 VARIO T in Bettumrandung einsetzen .....	60
16.4.2 Vario T und Bettumrandung durch Abstandshalter verbinden .....	60
16.5 Zubehör .....	62
16.6 Ersatzteile .....	62
<b>17.0 Gewährleistung .....</b>	<b>62</b>

## 1.0 Sicherheitshinweise

### 1.1 Verwendete Symbole

In der Anleitung werden folgende Symbole verwendet, um Ihnen spezielle Gefahren im Umgang mit dem Pflegebett oder Hinweise zur Vereinfachung der Handhabung des Pflegebettes aufzuzeigen.



#### **Achtung!**

Diese Symbole kennzeichnen Sicherheitshinweise die auf Gefahren im Umgang mit dem Produkt hinweisen.



#### **HINWEIS**

Unter diesem Symbol finden Sie Hinweise zur Handhabung.

### 1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die **Days Healthcare** Pflegebetten sind entsprechend der DIN EN 1970 für den ständigen Gebrauch durch behinderte Menschen an Stelle von Haushaltsbetten gedacht.

Sie dienen der Linderung oder Kompensation einer Behinderung oder Unfähigkeit sowie der Erleichterung der Arbeitsbedingungen für die pflegenden Personen.

Im Bereich der häuslichen Pflege sowie im Bereich der Pflegeheime oder ähnlicher Einrichtungen können **Days Healthcare** Pflegebetten auch entsprechend der DIN EN 60601-2-38 für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung eingesetzt werden.

**Durch Ihre Bauart sind Days Healthcare Pflegebetten nur für die Benutzung durch Personen über 12 Jahre zugelassen.**

Einsatzbereiche der Pflegebetten sind:

- die häusliche Pflege
- Pflegeheime und Reha-Einrichtungen

## 1.3 Allgemeine Hinweise

**Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Aufbau und der Inbetriebnahme des Pflegebettes sorgfältig durch!**

Sorgen Sie dafür, dass:

- die vollständige Bedienungsanleitung von allen Personen, die mit der Aufstellung, Bedienung oder Wartung des Pflegebettes beauftragt sind, gelesen wird.
- alle Personen, die mit der Aufstellung, Bedienung oder Wartung des Pflegebettes beauftragt sind, jederzeit Zugriff auf die vollständige Bedienungsanleitung haben.

Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, sind von jeder Gewährleistung ausgeschlossen.



### **Einschränkung der Verwendung!**

- *Patienten die größer sind als 195 cm sollten das Pflegebett nicht verwenden.*



### **Unfallgefahr!**

- *Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme den einwandfreien Zustand der Verkabelung und den Sitz und die Funktion der Zugentlastungen.*
- *Benutzen Sie die Pflegebetten nur zu ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung. Pflegebetten sind kein Leiternersatz, Turn- oder Spielgerät.*
- *Maximal sichere Arbeitslast = siehe Technische Daten.*
- *Verwenden Sie die Pflegebetten nur im technisch einwandfreien Zustand.*
- *Fahren Sie das unbeaufsichtigte Pflegebett immer in die niedrigste Höhe.*
- *Beseitigen Sie in jedem Fall sofort alle Störungen, welche die Funktion und Sicherheit des Pflegebettes beeinflussen.*
- *Sichern Sie das abgestellte Pflegebett in jedem Fall durch Betätigen der Radbremsen gegen Wegrollen!*
- *Betätigen Sie immer alle Radbremsen des Pflegebettes.*
- *Verwenden Sie nur von **Days Healthcare** freigegebenes Zubehör.*

## 1.4 Hinweise zur elektrischen Ausrüstung



### **Kurzschluss- und Brandgefahr!**

- *Vermeiden Sie jedes Überfahren der Versorgungskabel (Netzkabel), z.B. beim Bewegen des Pflegebettes und Nachttisches oder mit Reinigungsgeräten.*
- *Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme den einwandfreien Sitz der Verkabelung, ein Einklemmen oder Abknicken der Kabel ist zu vermeiden.*
- *Bei längerem Nichtgebrauch des Pflegebettes Netzstecker ziehen.*

## 1.5 Hinweise für Pflegepersonal, Betreuer und Bediener



### **Unfallgefahr!**

- *Nehmen Sie in den Pflegebetten keine medizinisch-elektrischen Anwendungen vor, bei denen der Patient intravaskular oder intrakardial mit dem medizinischen Gerät verbunden ist.*
- *Verwenden Sie das Pflegebett nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern (z.B. medizinische Großgeräte).*
- *Stecken Sie den Netzstecker des Pflegebettes immer in eine separate Wandsteckdose ein.*
- *Verlegen Sie das Netzkabel so zum Netzanschluß, dass kein mechanischer Zug ausgeübt wird und es nicht eingeklemmt, geknickt oder überrollt werden kann.*
- *Beachten Sie bei der Kombination des Pflegebettes mit anderen Geräten die entsprechende Bedienungs- und Montageanleitung des Gerätes hinsichtlich zusätzlich auftretender Sicherheitsrisiken. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr Sanitätshaus.*



### **Verletzungs- und Lebensgefahr durch Einklemmen!**

- *Beobachten Sie während des Verstellvorganges die im Pflegebett befindliche Person und die Umgebung des Bettes*
- *Vergewissern Sie sich bei untergewichtigen Patienten, dass der Patient nicht zwischen Auflage und Seitengitter rutschen kann.*
- *Verwenden Sie bei untergewichtigen Patienten den Seitengitterschutz von **Days Healthcare**.*
- *Rasten Sie die Seitengitter immer ordnungsgemäß ein.*



## **Lebensgefahr durch Lageänderung des Patienten!**

- *Verriegeln Sie am Handschalter alle Verstellfunktionen des Handschalters, bei denen die Lageänderung zur Gefährdung des Patienten führt (Rücksprache mit Arzt).*
- *Berücksichtigen Sie beim Verriegeln der Verstellmöglichkeiten immer den Zustand des Patienten.*



## **Kurzschluss- und Brandgefahr!**

- *Ziehen Sie den Netzstecker und sichern Sie das Netzkabel vor dem Schieben des Pflegebettes gegen Überfahren.*
- *Das Pflegebett darf nicht in Umgebungen verwendet werden, in denen mit entzündlichen Gasen oder Dämpfen (z.B. von Narkosemitteln) zu rechnen ist.*



## **Gefahr durch Überhitzen der Verstellmotoren!**

- *Vergewissern Sie sich vor der Verstellung der Betthöhe, dass keine Gegenstände den Verstellweg blockieren.*
- *Dauerbetrieb der Verstellmotoren über 2 Minuten vermeiden. Maximale Betätigungsdauer der Verstellmotoren = 2 Minuten. Mindestpause nach 2 Minuten Betätigung = 18 Minuten.*
- *Maximal zwei Verstellmotore gleichzeitig bedienen.*



## **Unfallgefahr durch Herausfallen!**

- *Fahren Sie das Pflegebett im unbeaufsichtigten Zustand sowie zum Ein- und Aussteigen immer in die niedrigste Höhe.*

## **1.6 Hinweise zum Aufstellen der Pflegebetten**



### **Verletzungsgefahr durch Falschmontage!**

- *Achten Sie auf die richtige Montage aller Bauteile des Pflegebettes.*
- *Prüfen Sie nach dem Aufbau alle Verstellmöglichkeiten auf einwandfreie Funktion.*



### **Unfallgefahr!**

- *Führen Sie Aufbauarbeiten nur mit geeigneten Werkzeugen aus.*
- *Führen Sie Aufbauarbeiten nur aus, wenn Sie im Umgang mit den benötigten Werkzeugen vertraut sind.*



## **Gefahr des Einklemmens und Quetschgefahr!**

An allen Gelenken des Pflegebettes und Auflagepunkten der Liegefläche besteht erhöhte Gefahr durch Einklemmen oder Quetschen.

- *Sichern Sie aufgeklappte Liegeflächen durch geeignete Maßnahmen gegen unbeabsichtigtes Zuklappen.*



## **Führen Sie nach allen Aufbauarbeiten einen Funktionstest durch!**

### 1.7 Hinweise zur Wartung und Inspektion

Alle Inspektionsarbeiten dürfen nur von oder unter Leitung und Aufsicht solcher Personen (Fachkraft) ausgeführt werden, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen in der Lage sind, den Inspektionszustand zu beurteilen und mögliche Auswirkungen und Gefahren zu erkennen.

Lesen Sie die entsprechenden Kapitel vor der Instandsetzung sorgfältig durch. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, sind von jeglicher Haftung ausgeschlossen.



## **Führen Sie nach Wartungsarbeiten und Inspektionen immer einen Funktionstest durch!**

- *Achten Sie beim Verfahren der Motoren darauf, dass die Kabel des Pflegebettes nicht gequetscht oder überdehnt werden.*



## **Gefahr durch elektrische und mechanische Fehler!**

- *Legen Sie fehlerhafte Pflegebetten sofort still und sichern Sie diese gegen unbefugtes Benutzen (Netzstecker ziehen).*
- *Verwenden Sie nur Originalersatzteile von **Days Healthcare**.*
- *Führen Sie die vorgeschriebenen Wartungen zu den angegebenen Intervallzeiten aus.*
- *Nehmen Sie keine Veränderungen an der elektrischen und mechanischen Ausstattung des Bettes vor, die nicht vom Hersteller genehmigt sind. Bei eigenmächtigen Veränderungen erlischt jegliche Haftung des Herstellers.*
- *Führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur mit geeigneten Werkzeugen aus.*
- *Elektrische Bauteile nicht öffnen.*

## 2.0 Ausführungen der Pflegebetten



Casa Med II



Casa Comfort II



Casa Vario T

## 3.0 Lieferumfang

Alle Bauteile werden in Kartons verpackt und auf einer Transportpalette der Bestellung entsprechend zusammengefaßt. Die stabile Kartonverpackung bietet Schutz gegen Beschädigungen. Die Transportpalette kann mit Hubwagen oder Gabelstapler bewegt werden.

Prüfen Sie den Inhalt der Verpackungen anhand der nachfolgend aufgeführten Listen, bevor Sie mit dem Aufstellen des Pflegebettes beginnen.

Klein- und Befestigungsteile werden der Lieferung je nach Pflegebettausführung beigefügt und sind nicht detailliert dargestellt.

Bei erkennbaren Mängeln oder fehlenden Bauteilen setzen Sie sich mit der Fa. **Days Healthcare** oder Ihrem Sanitätshaus in Verbindung.



Die Lieferung setzt sich je nach Ausführung des Pflegebettes aus Einzelkartons mit folgendem Inhalt zusammen:

### Scherenheber

Inhalt je nach Pflegebettausführung:

- (1) Einzelverriegelung der Lenkrollen
- (2) Zentralverriegelung der Lenkrollen
- (3) Ausführung mit Tellerfüßen

### Scherenheber




### Liegefläche

- 1 x (1) Liegeflächen-Kopfteil
- 1 x (2) Liegeflächen-Fußteil

### Liegefläche



Ausführung: je nach Pflegebett als 3-fach oder 4-fach geteilte Liegefläche.

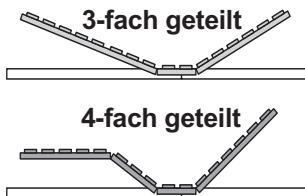

### Fronten\*

Inhalt je nach Pflegebettausführung:

- 2 x (1) Ausführung **Casa Med II**
- 2 x (2) Ausführung **Casa Comfort II**


### Fronten



### Seitengitter\*

- 8 x (1) Kappen für Seitengitter
- 4 x (2) Paneel für Seitengitter
- 4 x (3) Schieber für Seitengitter

### Seitengitter

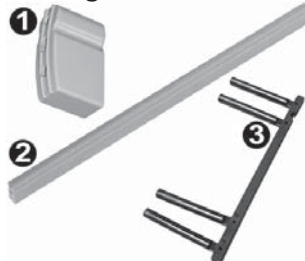

\* nicht für Casa Vario T


### Elektroelemente

- 1 x (1) Liegeflächenmotor mit Steuereinheit und Netzkabel
- 1 x (2) Blindstopfen für nicht belegte Steckbuchsen
- 1 x (3) Zugsicherung für Steckerleiste der Steuereinheit

### nur für 4-fach geteilte Liegefläche:

- 1 x (4) Liegeflächenmotor

### Elektroelemente

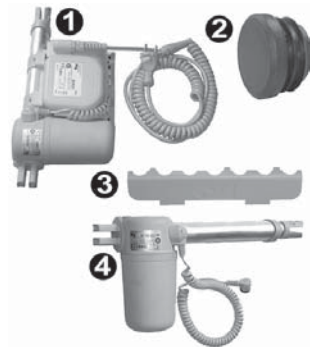

- 1 x (5) Handschalter mit Sperrfunktion

bei elektrisch sperrbarem Handschalter:

- 1 x (6) Magnetschlüssel

bei mechanisch sperrbarem Handschalter:  
(erkennbar am Drehschalter (a) auf der Rückseite des Handschalters)

- 1 x (7) Drehschlüssel

### Handschalter



### Aufrichter

- 1 x Aufrichtergestell mit Gurt und Triangel

### Aufrichter



### Seitenteil\*


- 2 x (1) Ausführung für Casa Comfort II

### Seitenteil



\* nicht für Casa Vario T

## 4.0 Bauteile

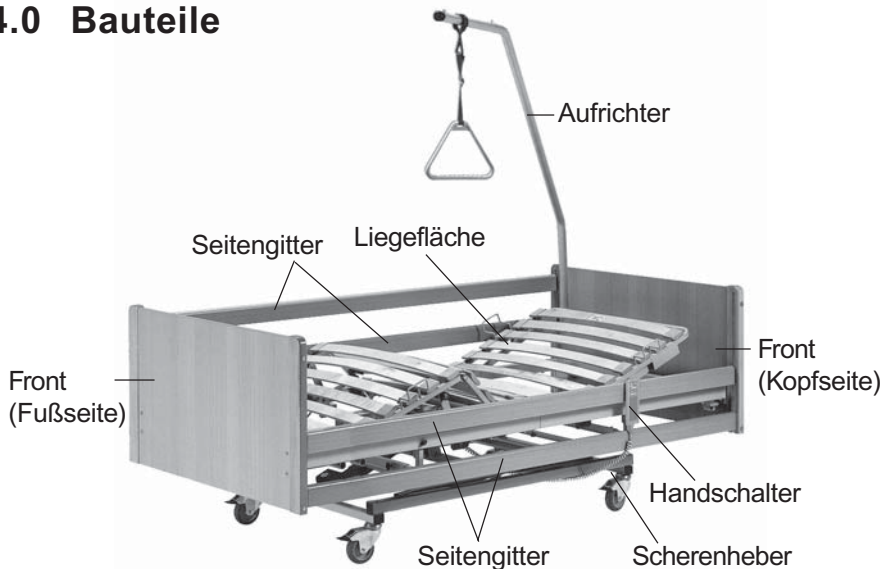


## 5.0 Ausstattung: Bettgestell

### 5.1 Seitengitter

Die Seitengitter (1) werden durch Schieber aus Kunststoff in Führungen am Kopf- und Fußteil des Pflegebettes befestigt. Die oberen Verriegelungen zum Absenken, sowie die untere Verriegelung zum Entfernen des Seitengitters können durch Betätigen eines Feststellknopfes (2) gelöst werden.

#### Seitengitter

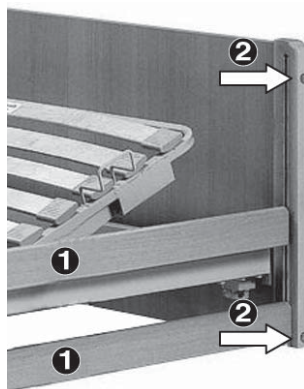

### 5.2 Liegefläche

Die Liegefläche ist je nach Pflegebettausführung 3-fach oder 4-fach geteilt.

Die Holzleisten der Liegefläche sind abwischbar und mit Kunststoffhaltern am Rahmen befestigt.

Die Matratze wird durch 4 Matratzenhalter (1) sicher auf der Liegefläche gehalten.

#### 3-fach geteilte Liegefläche:

Das Kopfteil (2) ist um 70° elektrisch verstellbar.

Die Verstellung des Fußteiles (3) erfolgt über einen Rastomat (siehe Kapitel 5.3).


#### 4-fach geteilte Liegefläche:

Das Kopfteil (2) ist um 70°, das Fußteil (3) bis 20° elektrisch verstellbar.

#### Liegefläche




#### 4-fach geteilt

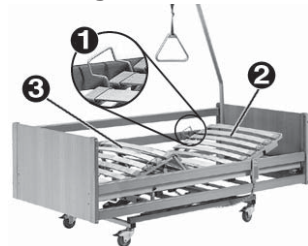

### 5.3 Winkelverstellung des Fußteiles (Rastomat)

Der an der Fußseite der Liegefläche montierte Rastomat (1) ermöglicht das stufenweise Absenken des Fußteiles (2) der 3-fach geteilten Liegefläche oder der Unterschenkelverstellung (3) der 4-fach geteilten Liegefläche.

#### Rastomat

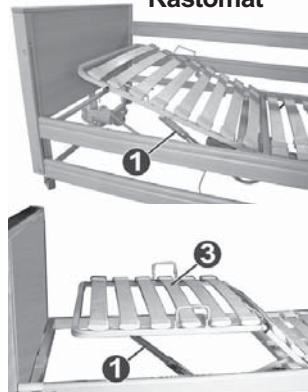


### 5.4 Scherenheber

Der Hubmotor (1) der Scherenheber ermöglicht eine Hubhöhe von 40 cm. Damit kann die Liegefläche des Pflegebettes von 40 cm auf 80 cm angehoben werden.

Die vier Lenkrollen (2) des Scherenhebers sind mit jeweils einer Bremse versehen. Sie blockiert die Roll- und Lenkbewegung der Lenkrolle.

#### Scherenheber

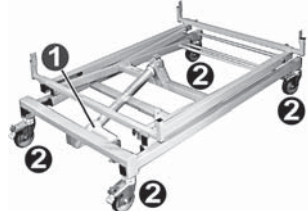

Beim Scherenheber mit Zentralverriegelung werden alle vier Lenkrollen über zwei Bremshebel (3) verriegelt.

### Scherenheber mit Zentralverriegelung



## 6.0 Ausstattung: Elektrik

### 6.1 Handschalter

Über den Handschalter werden alle Verstellmotoren des Pflegebettes bedient. Die Bedienung erfolgt über die Folientastatur an der Vorderseite des Handschalters. Mit dem an der Rückseite angebrachten Haltebügel kann der Handschalter an gut erreichbarer Stelle am Pflegebett angebracht werden.

### Handschalter



#### 6.1.1 Verriegelung des Handschalters

Je nach Ausführung ist der Handschalter mit einer elektrischen oder mechanischen Verriegelung der Tasten ausgestattet. Die Verriegelung sichert das Pflegebett gegen unbefugte Benutzung.


### Magnetschlüssel



Die elektrische Verriegelung wird mit dem mitgelieferten Magnetschlüssel ein- bzw. ausgeschaltet.

### Drehschalter

Die mechanische Verriegelung wird mit dem Drehschalter auf der Rückseite des Handschalters (a) geschaltet.

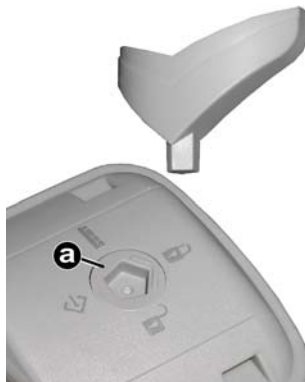

### 6.2 Liegeflächenmotor

Das Pflegebett mit 3-fach geteilter Liegefläche ist mit einem Liegeflächenmotor und das Pflegebett mit 4-fach geteilter Liegefläche mit zwei Liegeflächenmotoren ausgestattet. Sie sind unter der Liegefläche montiert. Jeweils ein Motor dient zur Verstellung des Kopfendes und ein Motor zur Verstellung des Fußendes der Liegefläche

Liegeflächenmotor



### 6.3 Steuereinheit

Die am Liegeflächenmotor angebrachte Steuereinheit (1) ist mit einer erstfehler-sicheren Elektronik versehen. Dadurch werden unerwünschte Funktionsabläufe aufgrund eines ersten Bauteildefektes ausgeschlossen. Sie ist spritzwasser-geschützt (IP 54) ausgeführt.

Das Netzkabel in verstärkter Ausführung entspricht EPR-Qualität (Etylen Propylen Rubber) und ist mit einem aufgeschobenen Knickschutz und einer Zugentlastung versehen.

Liegeflächenmotor mit Steuereinheit



## 7.0 Aufstellen des Pflegebettes

Prüfen Sie den Inhalt der Verpackungen anhand Kapitel 3.0 „Lieferumfang“, bevor Sie mit dem Aufstellen des Pflegebettes beginnen.

**Die Angabe „rechts“ und „links“ des Pflegebettes, ist mit Blickrichtung zur Kopfseite festgelegt.**



### Gefahr des Einklemmens und Quetschgefahr!

An allen Gelenken des Pflegebettes und Auflagepunkten der Liegefläche besteht erhöhte Gefahr durch Einklemmen oder Quetschen.

- *Sichern Sie aufgeklappte Liegeflächen durch geeignete Maßnahmen gegen unbeabsichtigtes Zuklappen.*



### Verletzungsgefahr durch Falschmontage!

• *Achten Sie auf die richtige Montage aller Bauteile des Pflegebettes.*

- *Prüfen Sie nach dem Aufbau alle Verstellmöglichkeiten auf einwandfreie Funktion.*



### Unfallgefahr!

• *Führen Sie Aufbauarbeiten nur mit geeigneten Werkzeugen aus.*


- *Führen Sie Aufbauarbeiten nur aus, wenn Sie im Umgang mit den benötigten Werkzeugen vertraut sind.*

## 7.1 Platzwahl und Platzbedarf

Beachten Sie bei der Platzwahl:

- an mindestens einer Bettseite muss genügend Platz zur Versorgung der im Bett befindlichen Person bleiben.
- in der Nähe des Stellplatzes und an gut erreichbarer Position muss sich eine Steckdose befinden.


Die Abbildung zeigt Ihnen die Maße der Stellfläche des Pflegebettes und der Freifläche.

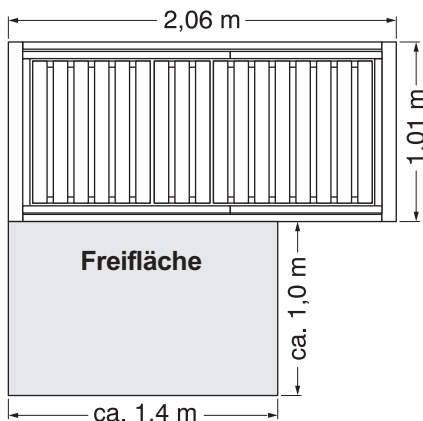


### 7.2 Scherenheber vorbereiten

- ➔ Alle Radbremsen des Scherenhebers feststellen.  
Beachten Sie hierzu das Kapitel 9.6 „Bedienung“.
- ➔ Alle Feststellschrauben (1) der Breitenverstellung der Liegeflächenaufnahmen am Scherenheber lösen.
- ➔ Aufnahmen (2) aus dem Scherenheber herausziehen und um 90° gedreht wieder einsetzen und etwa auf Liegeflächenbreite ausrichten.

#### Feststellschrauben lösen

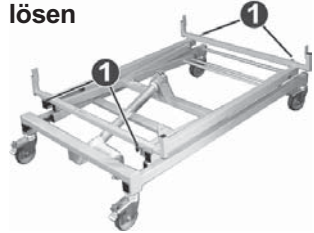

#### Aufnahmen drehen

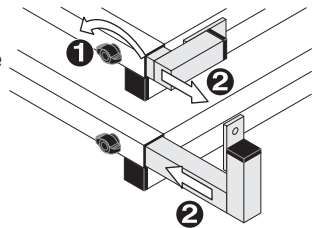

### 7.3 Kopf- und Fußteil der Liegefläche verbinden

- ➔ Kopfteil (1) mit den Führungen in den Rahmen des Fußteiles (2) bis zum Anschlag einschieben.
- ➔ Die Verbindung der Liegeflächenrohre durch Einschrauben und Festdrehen der Knebschrauben (3) sichern.

#### Liegefläche verbinden



#### HINWEIS


- Stellen Sie die zusammengesteckte Liegefläche zum weiteren Zusammenbau senkrecht an eine Wand.

#### Ausrichtung:

Oberseite der Liegefläche zur Wand und Kopfseite nach oben.

Die Kopfseite der Liegefläche ist durch einen entsprechenden Aufkleber am Rahmen gekennzeichnet.

#### Markierung Kopfseite Liegefläche

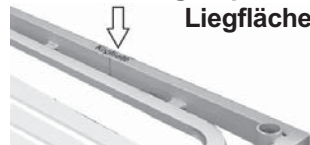


## 7.4 Elektroelemente montieren

### 7.4.1 Liegeflächenmotor der Kopfteilverstellung einsetzen

- Sicherungsbügel (1) der Schnellverschlußbolzen öffnen.




**Kopfseite**

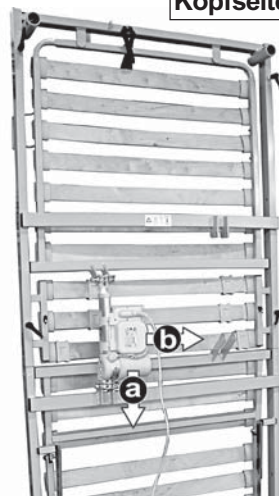

#### Einbaurichtung =

- (a) Motorgehäuse zur Fußseite der Liegefläche und
- (b) Steuereinheit nach rechts zur Mitte der Liegefläche ausrichten.

- Aufnahme der Kolbenseite (2) zwischen die Laschen des Verstellrahmens der Kopfseite einpassen.
- Schnellverschlußbolzen (3) einsetzen und durch Schließen des Sicherungsbügels sichern.
- Aufnahme der Motorseite (4) zwischen die Laschen am Liegeflächenrahmen einpassen.
- Schnellverschlußbolzen (5) einsetzen und durch Schließen des Sicherungsbügels sichern.

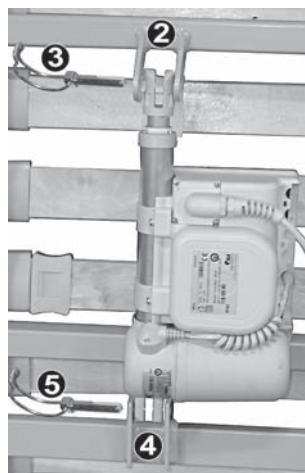


### 7.4.2 Liegeflächenmotor der Fußteilverstellung einsetzen

- ➔ Sicherungsbügel (1) der Schnellverschlußbolzen öffnen.




#### Einbaurichtung =

- (a) Motorgehäuse zur Kopfseite der Liegefläche und
- (b) nach links zur Mitte der Liegefläche ausrichten.

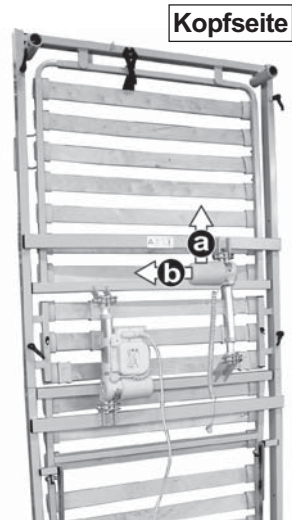


- ➔ Aufnahme der Motorseite (2) zwischen die Laschen am Liegeflächenrahmen einpassen.
- ➔ Schnellverschlußbolzen (3) einsetzen und durch Schließen des Sicherungsbügels sichern.
- ➔ Aufnahme der Kolbenseite (4) zwischen die Laschen des Verstellrahmens der Fußseite einpassen.
- ➔ Schnellverschlußbolzen (5) einsetzen und durch Schließen des Sicherungsbügels sichern.

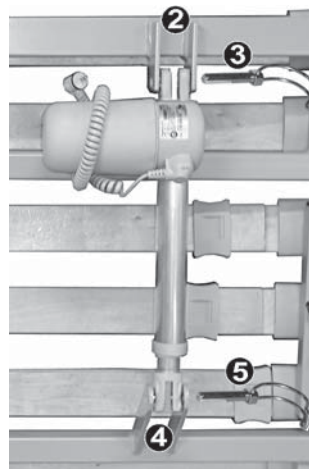

### 7.4.3 Liegeflächenmotor, Handschalter anschließen

**Beachten Sie beim Anschließen:**

- Die Dichtringe (a) der Stecker dürfen beim Einstecken nicht beschädigt werden.
- Die Nasen (b) der Stecker müssen mit den Führungsnuten (c) an der Steckbuchse ausgerichtet werden.

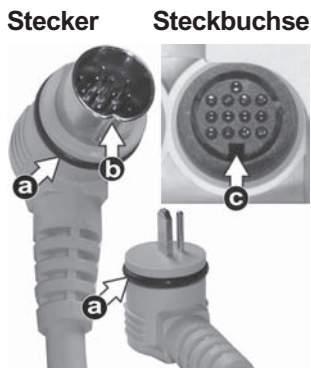


- ➔ Stecker der Elektrokomponenten wie in der folgenden Aufstellung gezeigt in die Steckbuchsen einstecken.

Die im Foto gezeigten Bezeichnungen der Steckplätze entsprechen denen auf der Steuereinheit.

**Anordnung der Stecker:**

- 1 = nicht belegt
- 2 = Handschalter
- 3 = Liegeflächenmotor  
(an der Steuereinheit vormontiert)
- 4 = \*Blindstopfen  
(nur bei 3-fach geteilter Liegefläche)  
oder  
Liegeflächenmotor für Fußteilverstellung  
(nur bei 4-fach geteilter Liegefläche)
- 5 = Hubmotorkabel; Scherenheber  
(siehe Kapitel 7.4.6)

**Steckeranordnung**

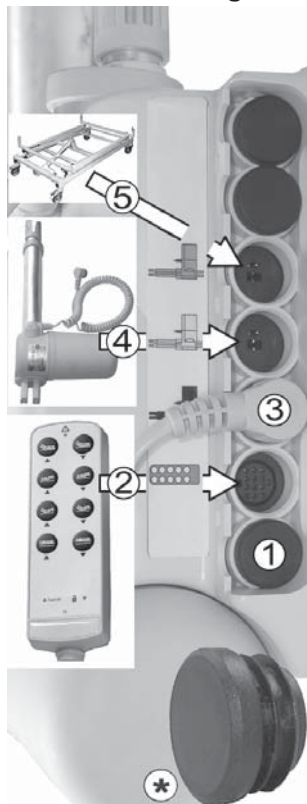

**\*HINWEIS**

Nicht belegten Steckbuchsen müssen mit Blindstopfen verschlossen werden.

### 7.4.4 Netzkabel der Steuereinheit befestigen



#### HINWEIS

Es befinden sich jeweils ein Halter (a) zur Verschraubung des Zug- und Knickschutzes des Netzkabels an der Kopf- und Fußseite des Liegeflächenrahmens.

Das Verlegen des Netzkabels zur Kopfseite ist zu bevorzugen.


#### Beachten Sie bei der Kabelverlegung:

- Kabel ohne Zugspannung verlegen
- großen Durchhang der Kabel vermeiden
- Kabel nicht in die Nähe von Quetsch- oder Scherstellen verlegen.


- ➔ Netzkabel zu dem, an der Kopfseite befindlichen Halter (a) zur Verschraubung des Zug- und Knickschutzes verlegen.

- ➔ Netzkabel und die Verschraubung (1) durch den Halter (a) am Rahmen der Liegefläche führen und mit Mutter (2) festschrauben (SW 19 mm).
- ➔ Überwurf (3) des Zug- und Knickschutzes auf die Verschraubung (1) aufdrehen und festschrauben (SW 19 mm).


Kopfseite

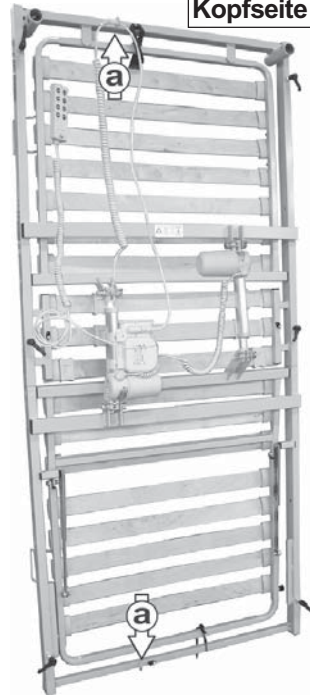

#### Halter für Zug- und Knickschutz (Kopfseite)

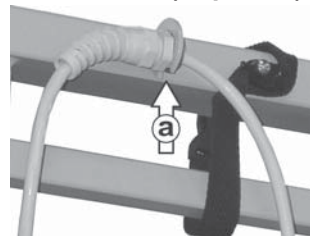

#### Detail: Zug- und Knickschutz

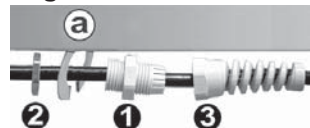


### 7.4.5 Kabel des Handschalters befestigen

### Position Zugentlastung




#### HINWEIS

Es sind an beiden Seiten des Pflegebettes Zugentlastungen (b) vorgesehen. Die Wahl der Seite ist vom Aufstellungs-ort abhängig.

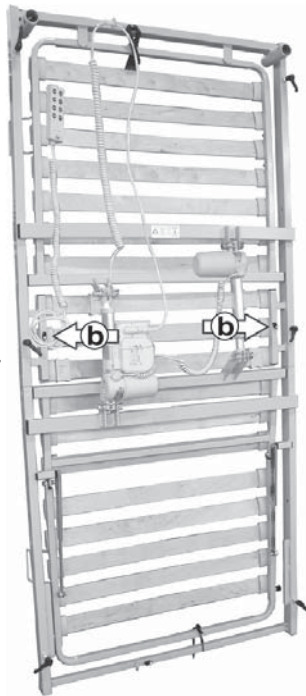

### Detail: Zugentlastung Handschalter

- ➔ Die Zugentlastung (b) für das Handschalterkabel (2) lösen, Kabel einlegen und Zugentlastung festschrauben.

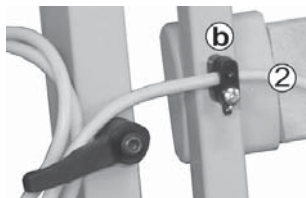

### 7.4.6 Liegefläche und Scherenheber verbinden

- ➔ Scherenheber (1) vor die Liegefläche stellen.  
Hubmotor muss von der Liegefläche weg weisen.



#### HINWEIS

Die Aufkleber „Kopfseite“ am Rahmen der Liegefläche und des Scherenhebers müssen übereinstimmen.

- ➔ Bremsen des Scherenhebers feststellen (siehe Kapitel 9.6)

#### Beachten Sie beim Anschließen:

- Der Dichtring (a) des Steckers darf beim Einstecken nicht beschädigt werden.

- ➔ Stecker des Hubmotors in Steckbuchse einstecken.


5 = Steckbuchse für Scherenheber

### Scherenheber platzieren

Kopfseite



### Scherenheber an Steuereinheit

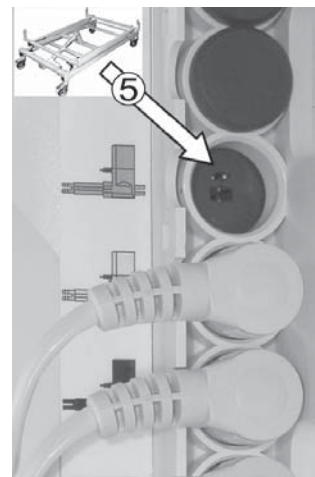


- ➔ Zugsicherung (2) einsetzen.

**Dazu:**

1. Zapfen in die Bohrungen einführen.
2. Klammern in die Aussparungenein klipsen.

### Zugsicherung einsetzen

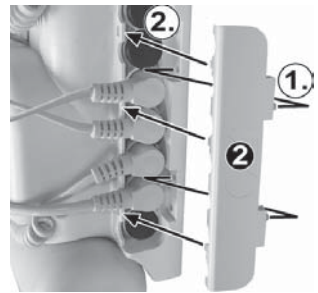


### HINWEIS

Beachten Sie vor dem Auflegen der Liegefläche, dass das Scherenheberkabel frei (a) zur Steuereinheit verlegt ist.



- ➔ Liegefläche auf die Aufnahmen (3) des Scherenhebers auflegen.


### Liegefläche auflegen

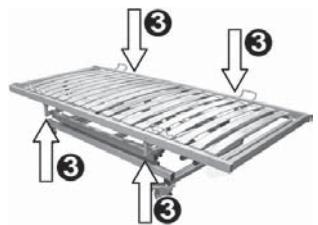

### Casa Med II /Vario T:

- ➔ Liegefläche durch Eindrehen der Befestigungsschrauben (4) am Scherenheber festschrauben.

### Verschraubung: Casa Med II /Vario T

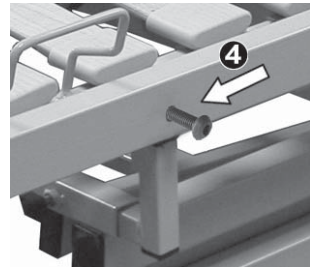


### HINWEIS

Bei den Pflegebett Casa Comfort II werden in dieser Aufbauphase die Seitenteile am Bettgestell verschraubt.

### Seitenteil: Casa Comfort II




### Verschraubung: Casa Comfort II

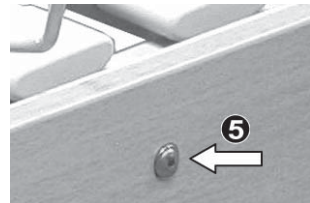

### Casa Comfort II:

- ➔ Seitenteile und Liegefläche mit den Befestigungsschrauben (5) am Scherenheber verschrauben.

### Liegefläche ausrichten

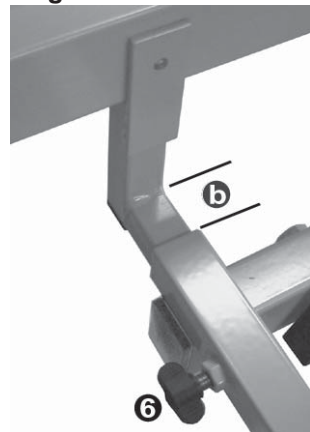


- ➔ Den Scherenheber durch Angleichen des Abstandes (b) der vier Aufnahmen mittig unter der Liegefläche ausrichten.
- ➔ Alle Feststellschrauben (6) der Breitenverstellung der Liegeflächenaufnahmen am Scherenheber festdrehen.

- ➔ Sicherungsband am Kopfteil öffnen und alle Transportsicherungen (c) am Kopf- und Fußteil entfernen.

### Transportsicherung entfernen




Zum Öffnen des Sicherungsbandes auf die seitlichen Laschen (d) der Verriegelung drücken und den Verschluss aufziehen.

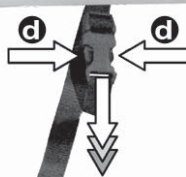


## 7.5 Fronten an der Liegefläche montieren

- ➔ Alle vier T-Stücke (1) zur Frontbefestigung an den Fronten (3) verschrauben.
  - (2) = Linsenkopfschrauben; M6 x 25
- ➔ Front mit den Führungen (4) der T-Stücke in die Rahmenrohre (5) der Liegefläche einschieben bis zum Anschlag.
- ➔ Die Verbindung der Front durch Einschrauben und Festdrehen der Knebel-schrauben (6) sichern.
- ➔ Die zweite Front an der Fußseite sinngemäß wie zuvor beschrieben montieren.

### T-Stücke verschrauben

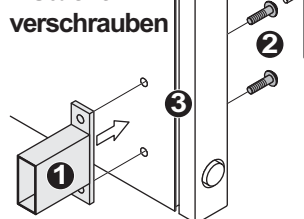

### Front einschieben und verschrauben

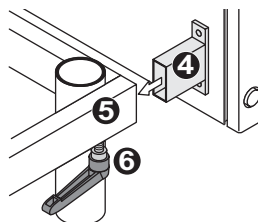

## 7.6 Kabelverlegung - Kabelplan

### Beachten Sie bei der Kabelverlegung:

- Kabel ohne Zugspannung verlegen
- großen Durchhang der Kabel vermeiden
- Kabel nicht in die Nähe von Quetsch- oder Scherstellen verlegen.

### Elektroelemente:

- a = Liegeflächenmotor mit Steuereinheit
- b = Hubmotor; Scherenheber
- c = Liegeflächenmotor für 4-fach geteilte Liegefläche
- d = Handschalter

### Kabelverlegung von Steuereinheit:

- 2 = zum Handschalter
- 3 = zum Liegeflächenmotor Kopfseite
- 4 = zum Liegeflächenmotor Fußseite der 4-fach geteilten Liegefläche
- 5 = zum Hubmotor; Scherenheber
- 6 = Netzkabel

### Kabelbefestigungen:


- I = Zugentlastung für Handschalterkabel
- II = Zugentlastung für Netzkabel



### HINWEIS

Es sind an beiden Seiten des Pflegebettes Zugentlastungen (I + II) vorgesehen.

### Kabelplan (Ansicht von oben)

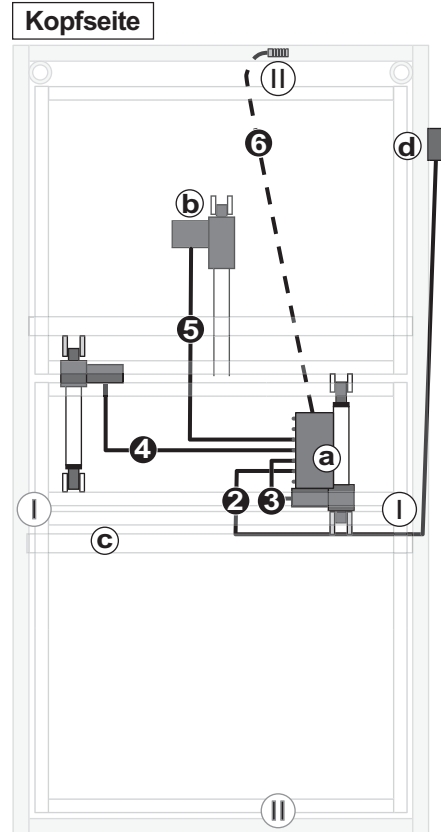


## 7.7 Funktionstest durchführen



### HINWEISE

- Beachten Sie beim Anschließen des Netzsteckers und der Prüfung der Verstellfunktionen die Hinweise im Kapitel 9.3 und 9.5.
- Prüfen Sie, ob die Transportsicherungen am Kopf- und Fußteil der Liegefläche entfernt sind (Kapitel 7.4.6)
- Achten Sie beim Verfahren der Motoren darauf, dass die Kabel des Pflegebettes nicht gequetscht oder überdehnt werden.

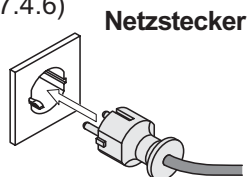

- ➔ Netzstecker einstecken.
- ➔ Alle Verstellungen des Pflegebettes auf ihre einwandfreie Funktion prüfen.
- ➔ Pflegebett in die höchste Position fahren.
- ➔ Netzstecker vom Netzanschluss trennen.

### Pflegebett hochfahren

## 7.8 Seitengitter einsetzen


Die Holme des Seitengitters sind unterschiedlich gebohrt.

- (a) oberer Holm des Seitengitters = Bohrung nach unten versetzt =
- (b) unterer Holm des Seitengitters = Bohrung nach oben versetzt


### Seitengitter an der Kopfseite einsetzen:

- ➔ Unteren Feststellknopf (1) drücken,
- ➔ Schieber (2) mit der Spitze nach oben in die Führungsnut (3) der Kopfseitenfront einschieben und
- ➔ in die obere Verriegelung einrasten.

### Bohrungen der Seitengitterholme

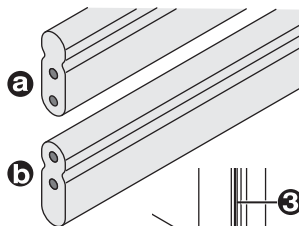

### Seitengitter - Schieber einsetzen

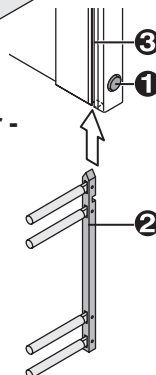

### Seitengitter aufschieben


- ➔ Kunststoffkappen (4) auf die Seitengitter aufschieben (Bohrungsposition beachten).



#### HINWEIS

Prüfen Sie vor dem Aufschieben, dass sich die Druckfeder in der Kappe befindet.

- ➔ Die Seitengitter (a+b) auf die Zapfen (5) des Schiebers aufschieben.

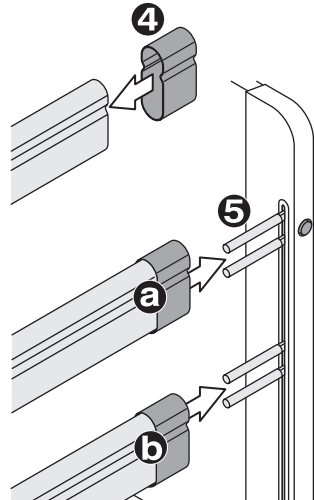

### Seitengitter an der Fußseite einsetzen:

- ➔ Kunststoffkappen (1) auf die Seitengitter aufschieben (Bohrungsposition beachten).




#### HINWEIS

Prüfen Sie vor dem Aufschieben, dass sich die Druckfeder in der Kappe befindet.

- ➔ Die Zapfen (2) des Schiebers in die Bohrungen von Kappe und Seitengitter einführen. Dabei muss die spitze Seite der Führungsschiene nach oben weisen (siehe Skizze).
- ➔ Unteren Feststellknopf (3) drücken.
- ➔ Schieber (4) in die Führungsnut der Fußseitenfront einschieben und
- ➔ in die obere Verriegelung einrasten.
- ➔ Das zweite Seitengitter sinngemäß wie zuvor beschrieben montieren.

### Seitengitter Fußseite

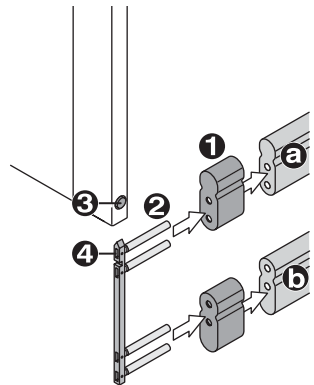

## 7.9 Aufrichter montieren

- ➔ Aufrichter (1) auf der gewünschten Kopfseite in die am Bettgestell angebrachte Aufrichteraufnahme (2) einstecken.




### HINWEIS

Die Führungsnut am Ende des Aufrichterrohres (1) muss über den Führungsbolzen in der Aufrichteraufnahme (2) greifen.

- ➔ Gurtschleife (3) der Triangel auf das Rohr des Aufrichters aufschieben.

## Aufrichter montieren

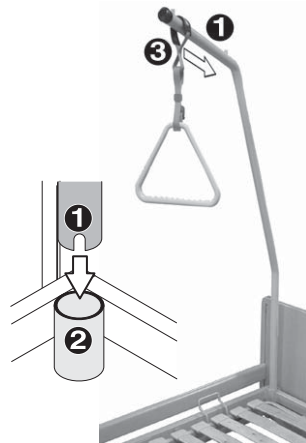

## 8.0 Sicherheitseinrichtung

### 8.1 Steuereinheit

Als Überlastschutz verfügt die Steuereinheit (1) über folgende Sicherheitseinrichtungen:

- Endschalter schalten die Verstellmotore beim Erreichen ihrer Endposition ab
- Thermoschalter schaltet die Steuereinheit bei Überhitzung ab. Nach einer Ruhephase von 20 - 30 Minuten ist die Steuereinheit wieder betriebsbereit.

### Steuereinheit



### Achtung!

**Diese Pflegebetten haben keinen Notschalter!**

- *In Notfällen Netzstecker ziehen!*

**8.2 Notentriegelung der Kopfteilverstellung**

Das Kopfteil des Pflegebettes kann bei Ausfall der Verstellmotoren durch Entfernen der Schnellverschlüsse der Liegeflächenmotore gelöst und abgesenkt werden.





**Unfallgefahr!**

- Die Bedienung der Notentriegelung darf nur von zwei Personen vorgenommen werden.


**Entriegeln der Kopfteilverstellung**

- ➔ Kopfteil der Liegefläche leicht anheben (1).
- ➔ Schnellverschlußbolzen (2) wie folgt entfernen (durch zweite Person!):
  1. Sicherungsbügel aufklappen
  2. Schnellverschlußbolzen aus der Aufnahme herausziehen.
- ➔ Kopfteil der Liegefläche langsam absenken (3).

**Kopfteil anheben und Schnellverschlußbolzen entfernen**

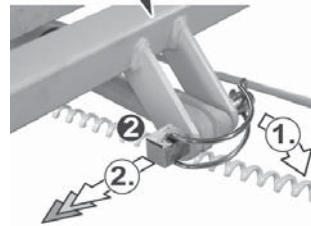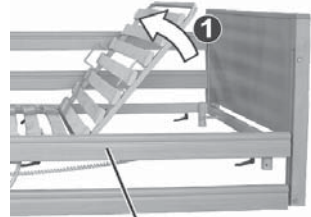

**Kopfteil absenken**

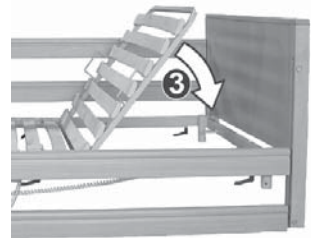

**Einsetzen der Schnellverschlußbolzen**

- ➔ Liegeflächenmotor durch Betätigen der Taste „Kopfteil absenken“ (4) am Handschalter bis zur Endposition einfahren.
- ➔ Schnellverschlußbolzen wie im Kapitel 7.5 „Liegeflächenmotor einsetzen“ beschrieben montieren.

**Handschalter**



## 9.0 Bedienung des Pflegebettes



### Unfallgefahr!

- Nehmen Sie in den Pflegebetten keine medizinischen, elektrischen Anwendungen vor.
- Verwenden Sie das Pflegebett nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern (z.B. medizinische Großgeräte).



### Gefahr des Einklemmens und Quetschgefahr!

- An allen Gelenken des Pflegebettes und Auflagepunkten der Liegefläche besteht erhöhte Gefahr durch Einklemmen oder Quetschen.
- Sichern Sie aufgeklappte Liegeflächen durch geeignete Maßnahmen gegen unbeabsichtigtes Zuklappen.

### Beachten Sie bei der Verstellung folgende Punkte:

- Vergewissern Sie sich vor der Verstellung der Betthöhe, dass keine Gegenstände den Verstellweg blockieren.
- Vermeiden Sie einen Dauerbetrieb der Verstellmotore von mehr als 2 Minuten (Aussetzbetrieb).

**Maximale** Betätigungsdauer der Verstellmotoren = 2 Minuten.

**Mindestpause** nach 2 Minuten Betätigung = 18 Minuten.

- Nicht mehr als zwei Verstellmotore gleichzeitig bedienen.
- Fahren Sie das Pflegebett zum Ein- und Aussteigen immer in die niedrigste Höhe.
- Beobachten Sie während des Verstellvorganges die im Pflegebett befindliche Person und die Umgebung des Bettes


## 9.1 Allgemeine Hinweise zur Bedienung - 3-fach geteilte Liegefläche

Die elektrische Verstellung des Kopfsteiles, sowie der Betthöhe erfolgt stufenlos.

Die mechanische Verstellung des Fußsteiles (Rastomat) erfolgt in zwei Stufen.


Der Verstellbereich der Liegeflächenhöhe liegt zwischen 40 und 80 cm.

Das Kopfteil kann um 70° nach oben gekippt werden.

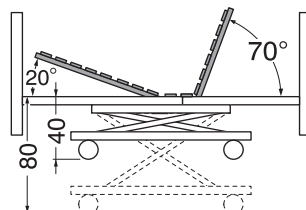

**9.2 Allgemeine Hinweise zur Bedienung -  
4-fach geteilte Liegefläche**

Die Verstellung des Kopf- und Fußteiles, sowie der Betthöhe erfolgt stufenlos. Der Verstellbereich der Liegeflächenhöhe liegt zwischen 40 und 80 cm. Das Kopfteil kann um 70° nach oben gefahren werden. Das Fußteil kann um 20° angeschragt werden. Zusätzlich kann die Unterschenkelverstellung mechanisch (Rastomat) abgesenkt werden.

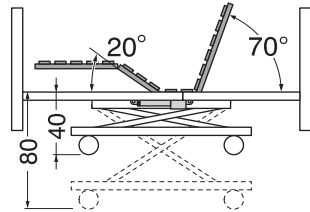

**9.3 Netzkabel einstecken**




**Unfallgefahr!**

- *Stecken Sie den Netzstecker des Pflegebettes immer in eine separate Wandsteckdose ein.*

Das Netzkabel ist nicht überfahrfest.

- *Verlegen Sie das Netzkabel so zum Netzanschluß, dass kein mechanischer Zug ausgeübt wird und es nicht eingeklemmt, geknickt oder überrollt werden kann.*

- Netzstecker nur in jederzeit gut erreichbare Steckdosen (230 V~ / 50Hz) einstecken.
- Prüfen Sie den ordnungsgemäßen Zustand des Netzkabels, des Netzsteckers und der Steckdose, bevor Sie den Netzstecker einstecken.

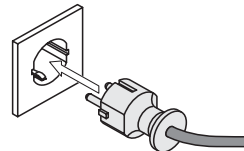

**Achtung! Pflegebetten haben keinen Notschalter!**


- *In Notfällen Netzstecker ziehen!*

## 9.4 Seitengitter anheben / absenken

### Seitengitter anheben

#### Anheben des Seitengitters:

- Seitengitter bis zum Einrasten des oberen Feststellknopfes (1) nach oben ziehen.

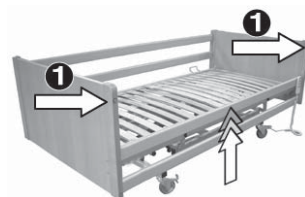

#### Absenken des Seitengitters:

- Seitengitter leicht anheben.
- Feststellknopf (1) eindrücken und Seitengitter absenken.



#### Achtung!


Seitengitter nicht ungesichert auf die untere Rastung fallen lassen!

- Führen Sie das Seitengitter beim Absenken mit der zweiten Hand bis zur unteren Rastung.

Kopf- und Fußende des Seitengitters immer in die gleiche Position bringen.

- Stellen Sie die Seitengitter nicht diagonal.

### Seitengitter absenken

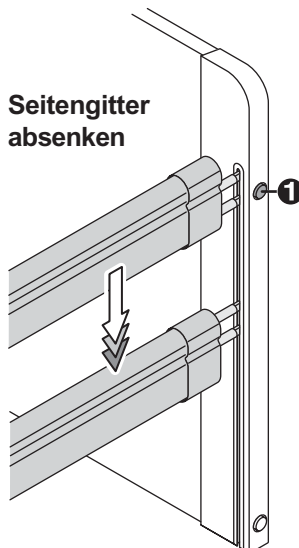

## 9.5 Verriegeln der Bedientasten der Pflegebettverstellung

Stellen Sie vor dem Verriegeln fest, mit welchem Handschalter Ihr Pflegebett ausgestattet ist.

Je nach Ausstattung kommen folgende Handschalter und Verriegelungen zum Einsatz:

### Handschalter Ausführung

### Merkmal 1

### Merkmal 2

### Beschreibung

#### IPROXX SE



Handschalter

Magnetische  
Verriegelung



siehe  
Kapitel 9.5.1

#### IPROXX SM



Handschalter

Mechanische  
Verriegelung



(a) Drehschalter  
(b) Drehschlüssel



2 Schalt-  
stellungen

siehe  
Kapitel 9.5.2

#### IPROXX SMP



Handschalter

Mechanische  
Verriegelung  
Programmier-  
bar



(a) Drehschalter  
(b) Drehschlüssel



4 Schalt-  
stellungen

siehe  
Kapitel 9.5.3

## 9.5.1 Bedientasten magnetisch sperren / freigeben

Die Einstellung der Verriegelung wird durch die LED's (Leuchtdioden)

- (1) Power On und
- (2) Schlosssymbol angezeigt.

### Bedientasten gesperrt / freigegeben:

- Mit dem flachen Ende des Magnetschlüssels über das Schlüsselsymbol (a) fahren.

Es sind 2 Schaltstellungen möglich, die durch wiederholtes Überfahren des Schlüsselsymbols geschaltet werden:

### 1. Bedientasten gesperrt

- Alle Bedientasten gesperrt.

#### Anzeige - Bedientasten verriegelt:

- (1) LED Power On - leuchtet
- (2) LED Schlüsselsymbol - aus


### 2. „Patientenmodus“

- Bedientasten freigeschaltet

#### Anzeige - „Patientenmodus“:

- (1) LED Power On - leuchtet
- (2) LED Schlüsselsymbol - leuchtet

### Bedientasten sperren / freigeben

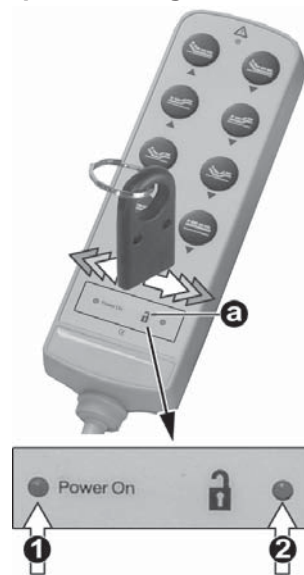

### 9.5.2 Bedientasten mechanisch sperren / freigeben

Die Einstellung der Verriegelung wird durch die LED (a) am Schlosssymbol angezeigt.


#### Bedientasten sperren / freigeben:

- ➔ Drehschlüssel in Drehschalter einstecken.
- ➔ Markierung (b) des Drehschalters in gewünschte Stellung drehen.

#### Drehschlüssel einstecken



#### LED Anzeigen am Handschalter

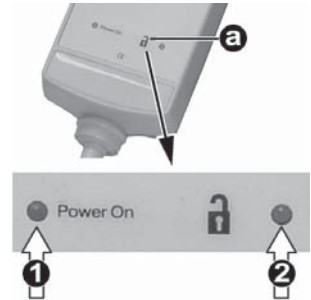

#### Schaltstellung 1 = „Patientenmodus“

- Alle Bedientasten freigegeben.

Symbol: 

#### Anzeige - „Patientenmodus“:

- (1) LED Power On - leuchtet
- (2) LED Schlüsselsymbol - leuchtet

#### Schaltstellung 2 = Bedientasten gesperrt


- Alle Bedientasten gesperrt.

Symbol: 

#### Anzeige - Bedientasten gesperrt:

- (1) LED Power On - leuchtet
- (2) LED Schlüsselsymbol - aus

#### Schaltstellungen

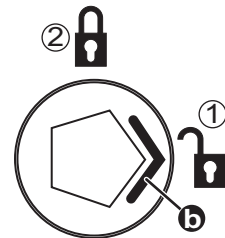

## 9.5.3 Bedientasten mechanisch sperren / freigeben

### (programmierbarer Handschalter)

Die Einstellung der Bedientasten wird durch die LED's (2) am Handschalter angezeigt.


LED ein = Bedientaste frei

LED aus = Bedientaste gesperrt

### Bedientasten sperren / freigeben:

- Drehschlüssel in Drehschalter einstecken.
- Markierung (a) des Drehschalter in gewünschte Stellung drehen.

LED Anzeigen am Handschalter

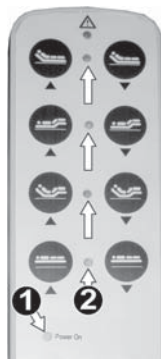

### Schaltstellung 1 = „Patientenmodus“

- Bedientasten mit leuchtender LED sind freigeschaltet.

Symbol: 

### Anzeige - „Patientenmodus“:

- (1) LED Power On - leuchtet
- (2) LED der freigeschalteten Funktion leuchtet

Drehschlüssel einstecken



### Schaltstellung 2 = Bedientasten gesperrt

- Alle Bedientasten gesperrt.

Symbol: 

### Anzeige - Bedientasten gesperrt:

- (1) LED Power On - leuchtet
- (2) LED's an den Bedientasten - aus

### Schaltstellung 3 = „Schwesternmodus“


- Alle Bedientasten freigeschaltet.

Symbol: 

### Anzeige - „Schwesternmodus“:

- (1) LED Power On - leuchtet
- (2) LED's an den Bedientasten - ein

Schaltstellungen

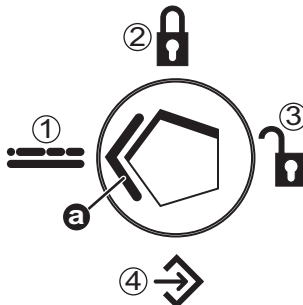

### Schaltstellung 4 = „Programmierstellung“ (siehe Kapitel 9.5.4)

## 9.5.4 Programmieren der Bedientasten

Bei der Programmierung können die Tastenreihen individuell für die Bedienung gesperrt / freigegeben werden.

Die Einstellungen werden durch die LED's (2) am Handschalter angezeigt.

LED ein = Bedientaste frei

LED aus = Bedientaste gesperrt

### Zum Programmieren:

- ➔ Drehschlüssel in Drehschalter einstecken.
- ➔ Markierung (a) des Drehschalters in die Programmierstellung (4) drehen.

Symbol: ➔

### Bedientasten sperren:

- ➔ Taste der Funktion die gesperrt werden soll drücken.

#### Anzeige - Bedientasten gesperrt:

- (1) LED Power On - leuchtet
- (2) LED neben der Funktion aus

### Bedientasten freigeben:

- ➔ Taste der Funktion die freigegeben werden soll drücken.

#### Anzeige - Bedientasten freigegeben:


- (1) LED Power On - leuchtet
- (2) LED neben der Funktion ein

### Nach dem Programmieren:

- ➔ Markierung (b) des Drehschalters in die „Patientenstellung“ drehen.

Symbol: 


### Tastenfunktionen

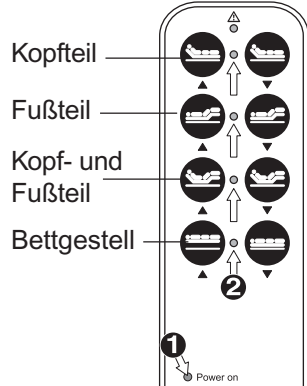

### Drehschlüssel einstecken



### Handschalter „Programmierstellung“

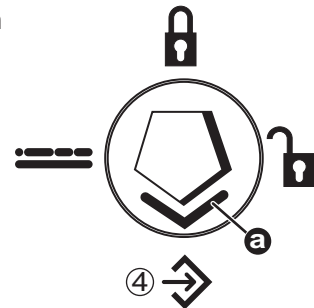

## 9.6 Bedienung der Pflegebettverstellungen



### HINWEIS


Der Handschalter ist bei der ersten Inbetriebnahme, nach Ziehen des Netzsteckers oder nach Stromausfall verriegelt.

### Signale des Handschalters bei Betätigung der Verstelltasten:

- Kontrollleuchte leuchtet bei Betätigung der Verstelltaste auf

### Fehlermeldungen:

- die Kontrollleuchte leuchtet bei Betätigung nicht auf = Steuereinheit defekt
- die Kontrollleuchte leuchtet ohne Betätigung dauerhaft = Steuereinheit defekt

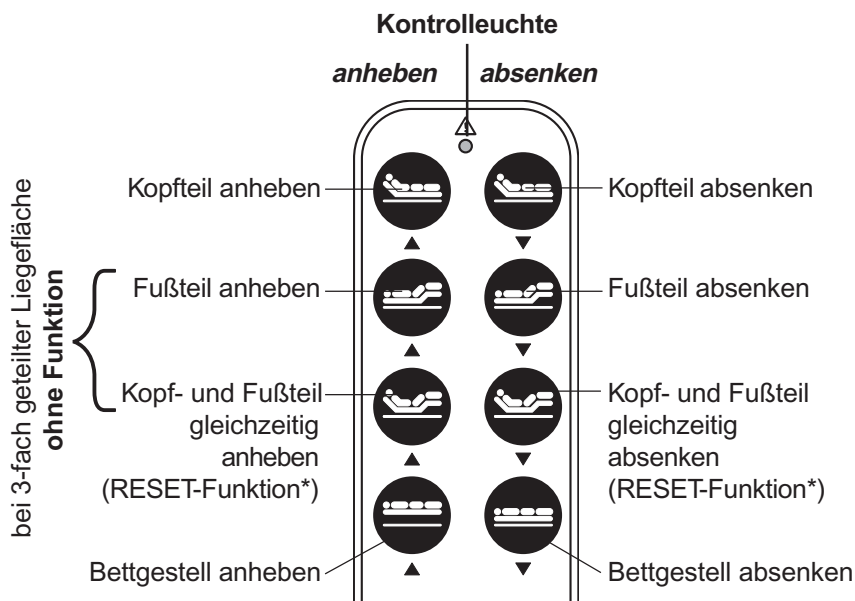

### \* Die RESET-Funktion:

Kopf- und Fußteil der Liegefläche werden gleichzeitig angehoben oder abgesenkt. Das ermöglicht das schnelle Verfahren der Liegefläche in die Grundposition.

### Grundposition



**9.7 Bedienung der Bremsen**

**Einzelradbremse (1):**




**Quetschgefahr!**

• Drehen Sie die Lenkrollen vor dem Festsetzen in Richtung der Liegefläche unter das Pflegebett.  
Achten Sie darauf, dass die Brems- und Lösehebel (a+b) frei zugänglich sind.

- ➔ (a) = Radbremsen festsetzen
- ➔ (b) = Radbremsen lösen


**Einzelradbremse**

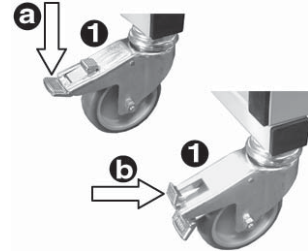

**Bremshebel (2), Zentralverriegelung:**

- ➔ (a) = Radbremsen festsetzen
- ➔ (b) = Radbremsen lösen

**Radbremsen, Zentralverriegelung**

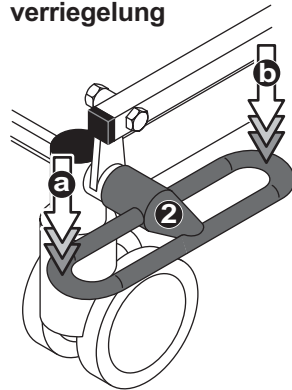


## 9.8 Fußteil der Liegefläche verstellen (Rastomat)




### HINWEISE

- Zum Anheben und Absenken das Fußteil mittig am Rahmen (a) anfassen.
- Der Rastomat dient zum Anheben des Fußteiles der 3-fach geteilten Liegefläche, oder zum Anheben der Unterschenkelauflage der 4-fach geteilten Liegefläche.
- Das Verstellen der Unterschenkelauflage der 4-fach geteilten Liegefläche kann sinngemäß wie im Folgenden beschrieben ausgeführt werden.

### Anheben - 3-fach geteilte Liegefläche

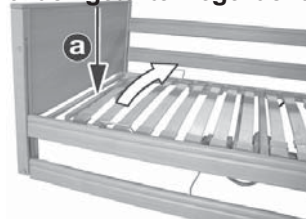

### Anheben - 4-fach geteilte Liegefläche

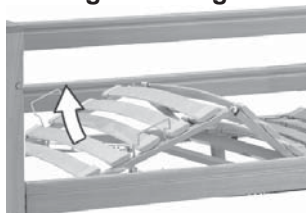


### Anheben (1) des Fußteiles (3-fach Liegefläche) / Anheben der Unterschenkelauflage des elektrisch angehobene Fußteiles (4-fach Liegefläche)

- ➔ Fußteil langsam in die gewünschte Position anheben, bis der Rastomat hörbar einrastet.




### HINWEIS

- Das Anheben des Fußteiles bis zum oberen Anschlag, entriegelt den Rastomaten.

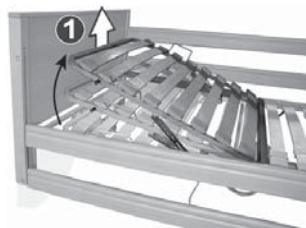

### Absenken (2) des Fußteiles

- ➔ a) Rastomat durch Anheben des Fußteiles entriegeln.
- ➔ b) Fußteil bis unteren Anschlag absenken oder
- ➔ c) Fußteil in die Mittelstellung absenken und Rastomat durch leichtes Anheben des Fußteiles hörbar einrasten.

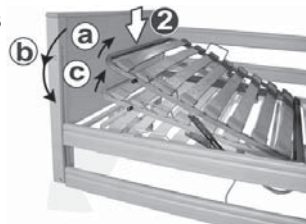

## 9.9 Schieben des Pflegebettes und Patiententransport



### HINWEISE

- Patienten nur in liegender Position transportieren.
- Ist der Aufrichter montiert, auf niedrig hängende Einrichtungsgegenstände (Deckenlampen) achten.

### Vor dem Schieben:


- ➔ Liegefläche in die Grundposition bringen.
- ➔ Kopf- und Fußteil der Liegefläche absenken (Kapitel 9.6 beachten).
- ➔ Seitengitter bis zum Einrasten des Feststellknopfes nach oben ziehen.

### Grundposition und Seitengitter anheben



- ➔ Radbremsen der Pflegebetten lösen (Kapitel 9.7 beachten).

### Radbremsen

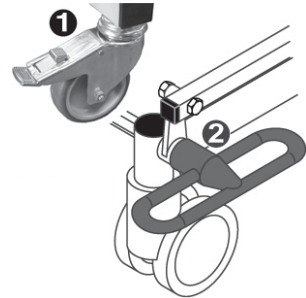


### Ausführung der Radbremsen:

- (1) Einzelradbremse
- (2) Zentralverriegelung

- ➔ Netzstecker vom Stromnetz trennen.
- ➔ Netzkabel durch Verzurren mit dem Sicherungsband (3) an der Kopfseite der Liegefläche gegen Überfahren sichern.

### Transportsicherung

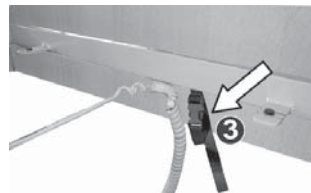

### Kurzschluss- und Brandgefahr!

- Sichern Sie das Netzkabel immer vor dem Schieben des Pflegebettes mit dem Sicherungsband (3) gegen Überfahren.

- ➔ Pflegebett verschieben

### Nach dem Schieben:

- Netzstecker aus dem Sicherungsband entfernen.

Zum Öffnen der Sicherung auf die seitlichen Laschen (4) der Verriegelung drücken und Verschluss aufziehen.


- Netzstecker in Steckdose einstecken (Kapitel 9.3 beachten).
- Radbremsen festsetzen (siehe auch Kapitel 9.7).



### HINWEIS

Drehen Sie die Lenkrollen nach dem Verschieben unter das Pflegebett.

### Transportsicherung öffnen

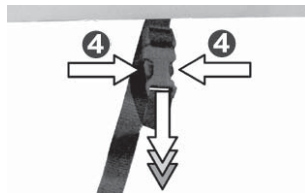


## 9.10 Federhärte der Liegefläche einstellen

Über die sechs an den mittleren Leisten der Liegefläche angebrachten Schieber (1), lässt sich die Federhärte der einzelnen Latten einstellen.

Damit kann die Liegefläche in bestimmten Grenzen auf das Gewicht des Benutzers eingestellt werden.

Schieber nach außen (+) = Härte vergrößern  
Schieber nach innen (-) = Härte verringern

### Schieber einstellen

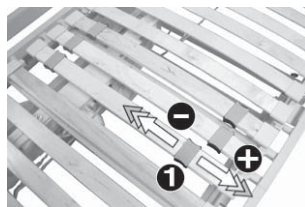

## 10.0 Patientenbezogene Sicherheitsmaßnahmen und Einstellungen durch das Pflegepersonal

### 10.1 Einschränkungen der Verwendung

Bestimmte Erkrankungen (klinische Zustände) des Patienten können zur Einschränkung der Verwendungsfähigkeit des Pflegebettes führen. Informieren Sie sich vor der Verwendung des Pflegebettes durch Rücksprache mit dem zuständigen Facharzt.



#### **Einschränkung der Verwendung!**

- *Patienten die größer sind als 195 cm sollten das Pflegebett nicht verwenden.*

### 10.2 Spaltmaße und Gitterabstände



#### **Verletzungs- und Lebensgefahr durch Einklemmen!**

- *Vergewissern Sie sich bei untergewichtigen Patienten, dass der Patient nicht zwischen Auflage und Seitengitter rutschen kann.*
- *Verwenden Sie bei untergewichtigen Patienten den Seitengitterschutz von **Days Healthcare**.*
- *Rasten Sie die Seitengitter immer ordnungsgemäß ein.*

Besonders bei sehr abgemagerten Patienten sind folgende Prüfungen am Pflegebett und die Ergreifung der entsprechenden Gegenmaßnahmen erforderlich:


#### **Prüfung:**

Der Patient darf nicht zwischen Matratze (1) und Seitengitter (2) geraten können.

#### **Gegenmaßnahme:**

Verwenden Sie nur Matratzen, die der Liegeflächenbreite (90 cm) entsprechen!

#### **Abstand Bettauflage - Seitengitter**

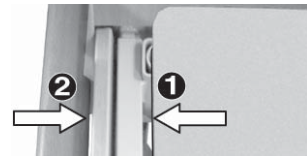

#### **Prüfung:**

Der Patient darf nicht zwischen die Holme des Seitengitters geraten können.

#### **Gegenmaßnahme:**

Einsatz des Seitengitterschutzes von **Days Healthcare**.

#### **Seitengitterschutz**



## 10.3 Verriegeln der Pflegebettverstellungen



### Lebensgefahr durch Lageänderung des Patienten!

- Verriegeln Sie die Verstellfunktionen des Handschalters, wenn eine Lageänderung zur Gefährdung des Patienten führt (Rücksprache mit Arzt).

Das Verriegeln der Verstellungen erfolgt am Handschalter. Die Bedienung der Verriegelung ist im Kapitel 9.5 beschrieben.

- Verriegelung nach dem Sperren durch Betätigen der Funktionstasten am Handschalter testen. Die Verstellung darf sich nicht bewegen. Bei fehlerhafter Verriegelung Handschalter oder Steuereinheit auswechseln.

## 11.0 Reinigung und Desinfektion während der Verwendung

### 11.1 Reinigen



#### HINWEISE

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfkantigen Werkzeuge (Messer, Metallspachtel) oder aggressive Lösungsmittel.
  - Verwenden Sie zum Reinigen keine Hochdruckreiniger.
  - Um Schäden an den Bauteiloberflächen zu vermeiden, beachten Sie die Anwendungshinweise des Reinigungsmittels.
- Verwenden Sie zum Reinigen feuchte Tücher.
  - Reinigen Sie alle Metallteile Holz- und Kunststoffoberflächen nur mit scheuermittelfreien, milden Reinigungsmitteln.

### 11.2 Desinfektion

Ist eine Desinfektion während der Verwendung erforderlich, dürfen nur geeignete Mittel nach dem **Days Healthcare** Hautschutz- und Hygieneplan verwendet werden.

## 12.0 Wiedereinsatz

Die **Days Healthcare** Pflegebetten sind für den Wiedereinsatz vorgesehen. Vor dem Wiedereinsatz ist eine Säuberung und Desinfektion durchzuführen. Beachten Sie hierzu den **Days Healthcare** Hautschutz- und Hygieneplan (Bestell-Nr. E1-05-001-000).

## 13.0 Prüfplan für Pflegebetten



### **Gefahr durch elektrische und mechanische Fehler!**

- *Legen Sie fehlerhafte Pflegebetten sofort still und sichern Sie diese gegen unbefugtes Benutzen (Netzstecker ziehen).*
- *Zeigen Sie festgestellte Mängel sofort den zuständigen Personen an!*



### **Unfallgefahr!**

- *Beseitigen Sie in jedem Fall sofort alle Störungen, welche die Funktion und Sicherheit des Pflegebettes beeinflussen.*

## 13.1 Tägliche Kontrolle

Folgende, routinemäßige Kontrollen können vom Pflegepersonal oder Betreuer ausgeführt werden:

- ➔ Seitengitter auf Leichtgängigkeit und Beschädigungen prüfen.
- ➔ Arretierung der Seitengitter auf Funktion prüfen.

### **Nach jedem Umstellen des Pflegebettes:**

- ➔ Netzkabel und Netzstecker auf Beschädigungen und Knickstellen prüfen.
- ➔ Netzkabel so vom Pflegebett zur Steckdose verlegen, dass es nicht eingeklemmt oder überrollt werden kann.

**13.2 Halbjährliche Kontrolle - Steuereinheit prüfen**

**Vorbereitung:**


- Alle Verstellfunktionen am Handschalter verriegeln (siehe Kapitel 9.5).  
Dannach Funktionstest wie im nachfolgenden Punkt „Prüfung“ beschrieben vornehmen.

**Verstellfunktionen verriegeln**



**Prüfung:**

- Alle Verstellungen durch Betätigen der entsprechenden Funktionstaste am Handschalter testen.  
Die Verstellungen dürfen nicht reagieren.  
Funktioniert eine Verstellung muß der Handschalter oder die Steuereinheit ersetzt werden.

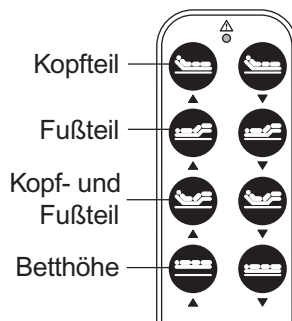

**13.3 Prüfintervalle**

Die Prüfintervalle sind abhängig von der Art des Einsatzes der **Days Healthcare** Pflegebetten.

- Unter normalen Umgebungs- und Betriebsbedingungen schreibt **Days Healthcare** Prüfintervalle von 2 Jahren für die sicherheitstechnische Kontrolle nach der MPBetriebV vor.
- Im Wiedereinsatz sollte die sicherheitstechnische Kontrolle vor jedem neuen Einsatz (nach dem Zusammenbau beim Patienten) und dann alle 2 Jahre stattfinden.
- Die Prüfintervalle sollten verkürzt werden, wenn das Pflegebett einer erhöhten Beanspruchung ausgesetzt ist (z.B häufiger Patientenwechsel im Pflegeheim). In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit **Days Healthcare** in Verbindung.

**13.4 Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) der mechanischen Bauteile**

Alle nachfolgend beschriebenen Inspektionsarbeiten darf nur sachkundiges und eingewiesenes Personal ausführen.

Die Auswertung der Prüfliste und die Instandsetzung der Pflegebetten darf nur von sachkundigem Personal mit der entsprechenden Ausbildung, Kenntnis und Erfahrung vorgenommen werden.

Beschreibung	Auswertung	
	i.O.	defekt
<i>Sichtprüfung aller Rahmen- und Gehäuseteile auf Verformung, Beschädigung, Verschleiß und Korrosion:</i>		
Liegefläche und deren Kunststoffelemente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitenteile der Liegefläche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kopf und Fußteil der Liegefläche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Führungen der Rückenverstellung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitengitter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle Bauteile der Hebeeinrichtung (Scherenheber)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laufrollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle Verbindungselemente (z.B. Mutter, Schrauben, Nieten...) auf Vollständigkeit, Funktion und einwandfreien Sitz prüfen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle Gehäuse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vorhandene Gehäuse-Dichtungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sitz der Gehäuse-Verschraubungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufrichteraufnahme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle Bauteile des Aufrichters	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Beschreibung	Auswertung	
	i.O.	defekt
<i>Funktionsprüfung der Laufrollen/Bremsen:</i>		
Leichtlauf des Fahrwerkes (Roll- und Lenkbewegungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arretierung der Lenkrollen in Geradeausstellung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funktion und Arretierung der Bremsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Funktionsprüfung der Seitengitter:</i>		
Leichtgängigkeit in den Laufschiene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verriegelung (Leichtgängigkeit, Spiel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abstand der Gitterholme, max. 12 cm, auch bei Belastung (siehe Maß A, Kap. 16.1 „Technische Daten“)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abstand vom Seitengitter zur Liegefläche max. 12 cm, auch bei Belastung (siehe Maß B, Kap. 16.1 „Technische Daten“)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verformung bei Belastung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Mechanische Prüfung des Aufrichters durch Belastung:</i>		
Triangel auf Festigkeit prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gurte der Triangel auf Festigkeit prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufrichterrohr auf Verformung bei Belastung prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**13.5 Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) der elektrischen Bauteile**

Beschreibung	Auswertung	
	i.O.	defekt
<i>Sichtprüfung der elektrischen Anlage:</i>		
Netzanschlussleitung auf Knicke und Beschädigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verkabelung des Handschalters auf Knicke und Beschädigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Netzstecker auf Beschädigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interne Verkabelung auf Knicke und Beschädigungen (besonders an den kritischen Stellen wie Kabeldurchführungen, den beweglichen Teilen der Liegefläche und der Hebe vorrichtung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Korrekte Verlegung der Verkabelung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>ordnungsgemäßer Sitz und Zustand aller:</i>		
Steckkontakte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichtungsringe der Steckkontakte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabeldurchführungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabelbefestigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zugentlastungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Knickschutzhüllen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Funktionsprüfung der elektrischen Anlage:</i>		
Abschaltung der Motoren durch Endlagenschalter durch Verfahren aller Verstellungen bis in die jeweiligen Endpositionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Abschaltung in Ordnung, wenn:</b> • das Schaltgeräusch der Abschaltrelais hörbar ist		
Motoren (Geräusche, Geschwindigkeit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tasten der Fernbedienung (Funktion, Leichtgängigkeit, Beschädigung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**13.6 Sicherheitstechnische Kontrolle - Messung nach BGV A3**

In einigen Ländern der Europäischen Gemeinschaft sind die im folgenden aufgeführten Messungen gesetzlich vorgeschrieben (in Deutschland nach BGV A3).

Die Ermittlung der länderbezogenen Gegebenheiten obliegt dem Betreiber des Pflegebettes.

Alle nachfolgend beschriebenen Messungen darf nur sachkundiges und eingewiesenes Personal unter Anwendung geeigneter Meßgeräte ausführen.

Festgestellte Mängel müssen sofort den zuständigen Personen angezeigt und beseitigt werden.



**Gefahr durch elektrische und mechanische Fehler!**

• *Legen Sie fehlerhafte Pflegebetten sofort still und sichern Sie diese gegen unbefugtes Benutzen (Netzstecker ziehen).*



**Unfallgefahr!**

• *Beseitigen Sie in jedem Fall sofort alle Störungen, welche die Funktion und Sicherheit des Pflegebettes beeinflussen.*

Beschreibung	Auswertung	
	i.O.	defekt
<i>folgende Messungen sind nach DIN/DE 0751 durchzuführen :</i>		
Schutzleiterwiderstand (nur Klasse I Geräte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ersatzableitströme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Angaben zur Messung der Ersatzableitströme:**

Typischer Wert: < 20 µA

- Prüfpunkte:
- Kurzgeschlossener Netzstecker (L+N) gegen...
    - 1.) ...metallische Teile der Hubmotoren (Frontenmotoren)
    - 2.) ...blanke, metallische Punkte der Liegefläche (Schrauben etc.)

### 14.0 Fehlersuche

Fehler	Ausführung	Ursache	Behebung
Kopfteil der Liegefläche oder das Bettgestell lassen sich nicht anheben/ absenken	alle Modelle	Netzstecker nicht eingesteckt	siehe Kap. 9.3
		Handschalter verriegelt	siehe Kap. 9.5
		Thermoschalter aktiv	nach 20-30 Minuten erneut versuchen
		Handschalter defekt Steuereinheit defekt	Fachhändler benachrichtigen
Fußteil der Liegefläche rastet beim Anheben nicht ein	alle Modelle	Rastomat defekt	Fachhändler benachrichtigen
Lenkrollen lassen sich nicht feststellen	Casa Med II / Casa Comfort II	Lenkrolle defekt	Fachhändler benachrichtigen
	Casa Med II Zentralverriegelung	Verriegelungsgestänge oder Lenkrollen defekt	Fachhändler benachrichtigen
Seitengitter klemmen	alle Modelle	Schieber verschmutzt oder gebrochen	siehe Kap. 7.8
Kontrollleuchte des Handschalters leuchte bei Betätigung nicht auf	alle Modelle	Handschalter verriegelt	siehe Kap. 9.5
		Antriebslast überschritten	Antriebe entlasten
		Steuerung defekt	Fachhändler benachrichtigen

### 15.0 Entsorgung

Pflegebetten bestehen aus Metall- und Kunststoffbauteilen, Elektronikkomponenten, Elektrokabel und Akkuboxen / Batterien. Die Entsorgung der einzelnen Materialien ist entsprechend den Umwelt- und Entsorgungsbestimmungen der jeweiligen Länder vorzunehmen.

- Pflegebetten dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt, sondern den kommunalen Sammelstellen zugeführt werden.
- Akkuboxen / Batterien, sowie alle elektrischen und elektronischen Komponenten dürfen nicht in den Hausmüll gelangen. Sie müssen fachgerecht entsorgt und den vorgeschriebenen Entsorgungsstellen übergeben werden.



Bei Fragen zur Entsorgung wenden Sie sich an die kommunalen Entsorgungsstellen oder den Fachhändler.

## 16.0 Anhang

### 16.1 Technische Daten: Pflegebett

CE-Kennzeichnung gemäß  
93/42/EWG

**Lagertemperatur:** +5°C bis +45°C  
**Lagerfeuchtigkeit:** 30% bis 75%

**max. Benutzergewicht** 165 kg

**max. Arbeitslast:**

Pflegebett <sup>1)</sup> \_\_\_\_\_ 200 kg

Aufrichter \_\_\_\_\_ 80 kg

**Gewichte des Pflegebettes:**

*Gesamtgewicht:*

Casa Med II \_\_\_\_\_ 134,5 kg

Casa Comfort II \_\_\_\_\_ 136,5 kg

Vario T \_\_\_\_\_ 86,5 kg

*Einzelgewichte:*

Liegefläche, Kopfteil \_\_\_\_\_ 17 kg

Liegefläche, Fußteil

3-fach geteilt \_\_\_\_\_ 14,6 kg

4-fach geteilt \_\_\_\_\_ 15,0 kg

Liegefläche komplett

3-fach geteilt \_\_\_\_\_ 29,1 kg

4-fach geteilt \_\_\_\_\_ 32,0 kg

Scherenheber \_\_\_\_\_ 40 kg

Holm des Seitengitters \_\_\_\_\_ 2 kg

Front...

... Casa Med II \_\_\_\_\_ 19,3 kg

... Casa Comfort II \_\_\_\_\_ 20,8 kg

Aufrichter \_\_\_\_\_ 7 kg

Steuereinheit \_\_\_\_\_ 1,8 kg

Liegeflächenmotor \_\_\_\_\_ 2,1 kg

Handschalter \_\_\_\_\_ 0,3 kg


**Zu verwendende Matratze<sup>2)</sup>:**

**Maße (Breite x Länge x Höhe):**

90x200x10

oder \_\_\_\_\_ 90x200x12

**Maße des Pflegebettes:**

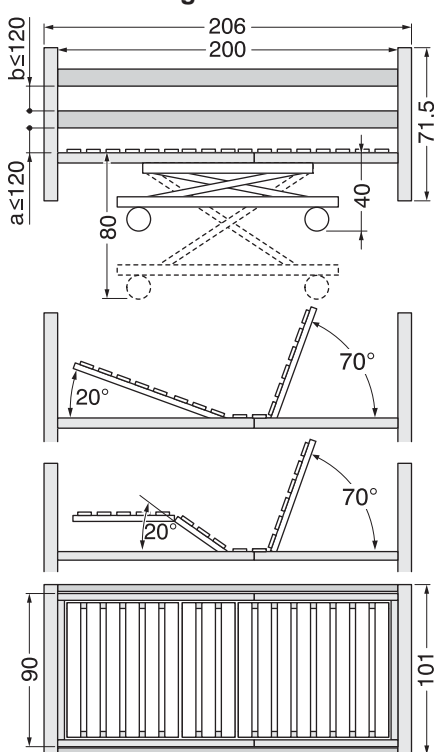

**Raumgewichte der Matratze<sup>2)</sup>:**

je nach Ausführung \_\_\_\_\_ 25 - 50 kg/m<sup>3</sup>

Gewicht \_\_\_\_\_ 6 - 12 kg

<sup>1)</sup> max. Arbeitslast = max. Benutzergewicht + 35 kg Zubehör (Matratze, Bettzeug usw.)

<sup>2)</sup> Matratze nicht im Lieferumfang enthalten / alle Maßangaben gerundet und in cm

## 16.2 Technische Daten: Antriebssystem

Netzanschluss 230 VAC 50 Hz  
 Schutzklasse \_\_\_\_\_ II  
 Schutzart \_\_\_\_\_ IP44  
 Geräuschpegel \_\_\_ ≤ 65 dB(A)  
 Maximale Betätigungsdauer \_\_\_\_\_ 2 Minuten  
 Mindestpause nach  
 Betätigung \_\_\_\_\_ 18 Minuten






Hub - Liegeflächenmotor  
 Kopfteil \_\_\_\_\_ 85 mm  
 Fußteil \_\_\_\_\_ 85 mm

**Betriebsbedingungen:**  
 Raumtemperatur \_\_\_\_\_ +10°C  
 bis \_\_\_\_\_ +40°C  
 relative Luftfeuchte \_\_\_\_\_ 30%  
 bis \_\_\_\_\_ 75%  
**Lagerfeuchtigkeit:** 30% bis 75%

## 16.3 Kennzeichnung der Pflegebetten

### 16.3.1 Typenschild des Pflegebettes

Das Typenschild befindet sich an einer Front des Pflegebettes und zeigt u.a. folgende Angaben:


-  = Schutzklasse II (schutzisoliert)
-  = CE-Kennzeichnung gemäß 93/42/EWG
-  = Anwendungsteil Typ B
- IP 44** = Schutzart (Spritzwassergeschützt)
-  = Hinweis auf die Bedienungsanleitung  
 AB 2 min/ 18 min = 2 Minuten maximale Betätigungsdauer der Verstellmotoren  
 = 18 Minuten Mindestpause nach 2 Minuten Betätigung
-  = Hinweis zur Entsorgung



### 16.3.2 Bauteilschild des Aufrichters

Das Bauteilschild befindet sich im unteren Bereich am Aufrichterrohr und zeigt u.a. folgende Angaben:

- Warnhinweis auf die maximale Belastbarkeit des Aufrichters.
- Artikelbezeichnung \_\_\_\_\_
- Hinweis auf die Bedienungsanleitung \_\_\_\_\_

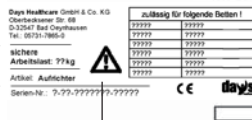

**16.4 Einsetzen des Vario T Pflegebettes in vorhandene Bettumrandungen**

**16.4.1 VARIOT in Bettumrandung einsetzen**



**Verletzungsgefahr durch hohes Bauteilgewicht!**


• *Das Einsetzen des Vario T Pflegebettes muss immer von zwei Personen durchgeführt werden.*



**Unfallgefahr! Beachten Sie folgende Punkte:**

- *Es muss ausreichend Abstand zwischen der Liegefläche des Vario T und der vorhandenen Bettumrandung vorhanden sein.*
- *Die Bettumrandung und das Vario T dürfen sich nicht gegeneinander verschieben lassen. Bei Bedarf Befestigungselemente verwenden (siehe Kap. 16.4.2).*

- ➔ Den alten Lattenrost aus der vorhandenen Bettumrandung entfernen.
- ➔ Die vorhandene Bettumrandung an die gewünschte Position stellen und das Vario T hineinstellen.
- ➔ Vario T durch Verdrehen der Stellfüße (1) waagrecht ausrichten (Wasserwaage).  
**Mass a = min. 30 mm  
max. 60 mm**
- ➔ Stellfüße durch Festdrehen der Sicherungsmutter (2) feststellen.

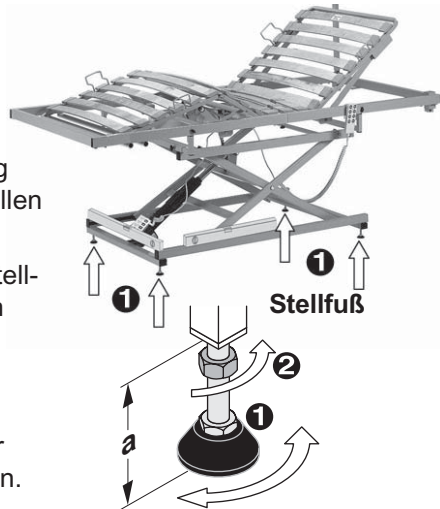

**16.4.2 Vario T und Bettumrandung durch Abstandshalter verbinden**

Bei nicht ausreichender Stabilität der vorhandenen Bettumrandung kann diese durch Abstandshalter mit dem Vario T verbunden werden. Die Abstandshalter sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen gesondert bestellt werden.


**Lieferumfang:**

- 4 x Abstandshalter
- 4 x Befestigungsschrauben, M10 x 25 (ohne Abb.)



### Abstandhalter einsetzen:


- Sicherungsmutter (2) lösen und Stellfuß (1) des Vario T Scherenhebers entfernen.
- Abstandhalter (3) in das obere Profil des Scherenhebers (4) bis zum Anschlag einschieben.
- Befestigungsschraube (5) in das Gewinde des Stellfußes eindrehen.
- Abstandhalter durch Festdrehen der Befestigungsschraube sichern.
- Alle weiteren Abstandhalter, sinngemäß wie zuvor beschrieben, einsetzen.
- Nach dem Einsetzen der Abstandhalter Vario T erneut waagrecht ausrichten (siehe Kap. 16.4.1).

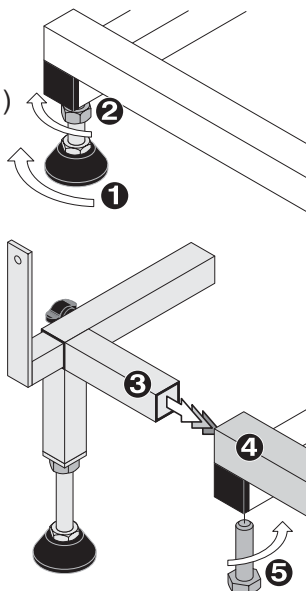

### Casa Vario T zur Bettumrandung ausrichten und befestigen:

- Das Vario T durch Angleichen des Abstandes (a) der vier Abstandhalter (3) mittig in der Bettumrandung ausrichten.  
**maximaler Abstand (a) = 245 mm**
- Die Feststellschrauben (6) für die Abstandhalter festdrehen.
- Abstandhalter des Vario T und Bettumrandung mit entsprechenden Befestigungsschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) verbinden (7).

### VARIO Tausrichten

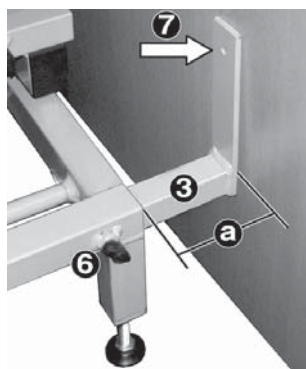

**16.5 Zubehör**

Zur Bestellung der Artikel wenden Sie sich bitte an Ihren **Days Healthcare** Fachhändler.

Bezeichnung	Bestell-Nummer	
	Med II / Comfort II	Vario T
Urinflasche mit Halter	03-20-000-000-00	
Infusionshalter	03-21-000-000-00	
Seitengitterschutz, Abm. 190 x 39 cm, 1 Stück	B4-01-001-050	xxx
Triangel mit längenverstellbarem Gurt	K2-03-001-002	
Wandabweisrollen, 4 Stück	03-23-000-000-00	xxx
Seitengitter, wegklappbar*, beige, rechts	B3-05-01R	
Seitengitter, wegklappbar*, beige, links	B3-05-01L	

\*nicht für Vario T, wenn es in eine Bettumrandung eingebaut ist

**16.6 Ersatzteile**

Ersatzteile sind über Ihren **Days Healthcare** Fachhändler zu beziehen. Es sind nur original **Days Healthcare** Ersatzteile zu verwenden (siehe Händlerstempel auf der Rückseite des Umschlages).

**17.0 Gewährleistung**

Für die Pflegebetten übernimmt **Days Healthcare** im Rahmen seiner allgemeinen Geschäftsbedingungen für 24 Monate die Gewährleistung auf einwandfreie Beschaffenheit.

(Stempel des Fachhändlers)

*better* **days** *by*  
**atoform**<sup>®</sup>

A T O F O R M G m b H  
Zur Lauterhecke 34 • D-63877 Sailauf  
Tel. 06093.944-0 • Fax 06093.944-444  
w w w . a t o - f o r m . c o m

a **DCC** company