

SEITENGITTER

FÜR PFLEGE BETTEN



MONTAGE UND BEDIENUNG

Mit dem, in der folgenden Anleitung beschriebenen, Seitengitter können **Days Healthcare** Pflegebetten ab einer Liegeflächenlänge von 2 m nachgerüstet werden:

Das Seitengitter ist ausschließlich für die Montage an folgenden Pflegebetten vorgesehen:

- Casa Med Ultra 4
- Casa Med Classic 4
- Casa Nuova
- Casa Med II
- Casa Vario T

Die Montage und Verwendung im Zusammenhang mit Pflegebetten anderer Hersteller gilt als nicht Bestimmungsgemäß und entzieht sich jeglicher Haftung von **Days Healthcare**.

Lesen Sie die Montageanleitung vor Montagebeginn sorgfältig durch. Jeglicher Schaden, der durch die Nichtbeachtung der Anleitung entsteht, ist von der Haftung ausgeschlossen.

Das Aussehen der gelieferten Bauteile kann ggf. von den Fotodarstellungen abweichen.

Das dargestellte Pflegebett dient nur als Montagemodell.

Die Anleitung ist nach den zum Zeitpunkt der Drucklegung bekannten Informationen hinsichtlich der Ausführung und Bedienung des Seitengitters erstellt worden. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Bei Fragen zu dem Seitengitter wenden Sie sich bitte an Ihr Sanitätshaus oder direkt an:

Days Healthcare GmbH & Co. KG
Oberbeckseener Strasse 68
32547 Bad Oeynhausen

(t) + 049 (0)5731.78 65 - 0
(f) + 049 (0)5731.78 65 - 20

(e) info@dayshealthcare.de
(w) www.dayshealthcare.de

Inhalt

1.0	Sicherheitshinweise	2
2.0	Lieferumfang	2
4.0	Montage	2
3.0	Werkzeug	2
5.0	Bedienung	3
6.0	Reinigung und Inspektion	4
6.1	Reinigen	4
6.2	Desinfektion	4
6.3	Inspektion	4
7.0	Wiedereinsatz	4
8.0	Gewährleistung	4

1.0 Sicherheitshinweise

Die vorliegende Montage- und Bedienungsanleitung ergänzt die Bedienungsanleitung des jeweiligen Pflegebettes und ist zusammen mit dieser aufzubewahren.

- Alle Personen, die mit dem Seitengitter umgehen, müssen jederzeit Zugriff auf die Montage- und Bedienungsanleitung des Seitengitters haben.



Unfallgefahr!

- Führen Sie die Montagearbeiten nur mit geeigneten Werkzeugen aus.



Gefahr des Einklemmens und Quetschgefahr!

- An allen Gelenken des Seitengitters besteht erhöhte Gefahr durch Einklemmen oder Quetschen.
- Beachten Sie, dass der Feststellknopf des aufgeklappten Seitengitters eingerastet ist.
- Führen Sie das Seitengitter beim Absenken mit der zweiten Hand bis zum unteren Anschlag.



Unfallgefahr!

- Verwenden Sie das Seitengitter nur im technisch einwandfreien Zustand.
- Entfernen Sie beschädigte Seitengitter sofort vom Pflegebett.

2.0 Lieferumfang

ein Seitengitter (rechte oder linke Ausführung),
incl. Befestigungsschrauben



3.0 Werkzeug

Zur Montage des Seitengitters benötigen Sie folgendes Werkzeug:

- 1 x 13 mm Ringschlüssel
- 1 x Bandmaß



4.0 Montage



HINWEIS:

- Eventuell eingedrehte Befestigungsschrauben (1), vor der Montage entfernen.

Achten Sie bei der Montage darauf, dass das Seitengitter jeweils nur für die rechte oder linke Bettseite ausgelegt sind.

Abgerundete Seite = Fußseite


- ➔ (a) Seitengitter mit der abgerundeten Seite zur Fußseite und
- ➔ (b) dem Verriegelungsknopf nach außen auf das Rahmenrohr des Bettrahmens aufschieben.



Fußseite



- ➔ Abstand von **6 cm** zur kopfseitigen Front einstellen.
- ➔ (c) Befestigungsschrauben einschrauben und festdrehen bis das Seitengitter sicher auf dem Rahmenrohr festklemmt.

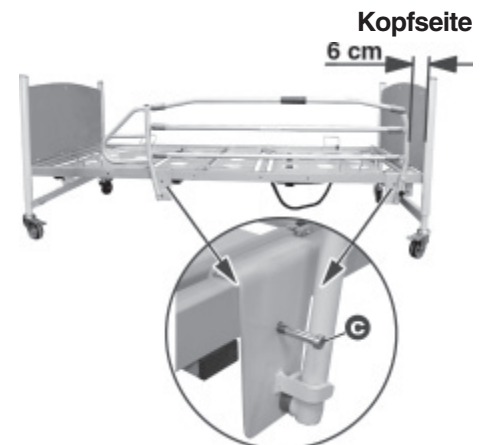


5.0 Bedienung

Absenken des Seitengitters:

- ➔ (1) Feststellknopf ziehen und
- ➔ (2) Seitengitter am Handgriff nach unten schwenken.

absenken

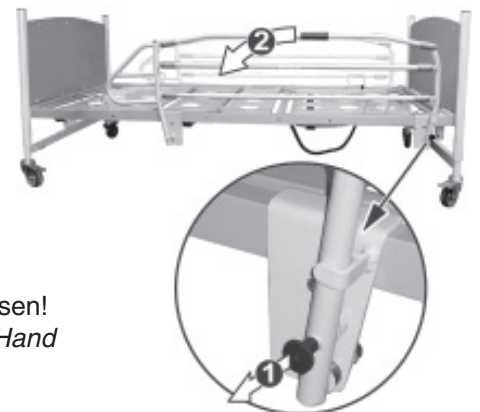


Quetschgefahr!

- Seitengitter nicht ungesichert auf die untere Position fallen lassen!
- Führen Sie das Seitengitter beim Absenken mit der zweiten Hand bis zum unteren Anschlag.

Anheben des Seitengitters:

- ➔ (3) Seitengitter am Handgriff nach oben schwenken, bis
- ➔ (4) der Feststellknopf in die Arretierbohrung einrastet.

anheben

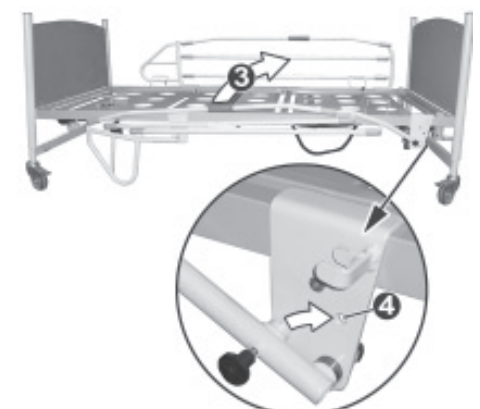

6.0 Reinigung und Inspektion

6.1 Reinigen

- ➔ Verwenden Sie zum Reinigen feuchte Tücher.
- ➔ Reinigen Sie alle Bauteile nur mit scheuermittelfreien, milden Reinigungsmitteln.



HINWEISE:

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfkantigen Werkzeuge (Messer, Metallspachtel) oder aggressive Lösungsmittel.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Hochdruckreiniger.
- Um Schäden an den Bauteiloberflächen zu vermeiden, beachten Sie die Anwendungshinweise des Reinigungsmittels.

6.2 Desinfektion

Ist eine Desinfektion während der Verwendung erforderlich, dürfen nur geeignete Mittel nach dem **Days Healthcare** Hautschutz- und Hygieneplan verwendet werden.

6.3 Inspektion

Das Seitengitter ist in den Inspektionsplan des Pflegebettes einzubeziehen. Es gelten die dort vermerkten Prüfanforderungen und Intervalle.

Entfernen Sie beschädigte Seitengitter sofort vom Pflegebett.

Inspektionplan:

Beschreibung	Auswertung	
	i.O.	defekt
<i>Funktionsprüfung der Seitengitter:</i>		
Gelenke (Leichtgängigkeit, geringes Spiel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verriegelung (Leichtgängigkeit, geringes Spiel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abstand vom Seitengitter zur Liegefläche max. 12 cm, auch bei Belastung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abstand von 6 cm zur kopfseitigen Front	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
geringe Verformung bei Belastung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7.0 Wiedereinsatz

Das Seitengitter ist für den Wiedereinsatz vorgesehen. Vor dem Wiedereinsatz ist eine Säuberung und Desinfektion durchzuführen. Beachten Sie hierzu den **Days Healthcare** Hautschutz- und Hygieneplan (Bestell-Nr. E1-05-001-000).

8.0 Gewährleistung

Für das Seitengitter übernimmt **Days Healthcare** im Rahmen seiner Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 24 Monate die Gewährleistung auf einwandfreie Beschaffenheit.